



FICHA TÉCNICA

BOLSAS DE UROSTOMÍA SURFIT NATURA™ CON VÁLVULA ACCUSEAL™

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Bolsa de Urostomía
Nombre Comercial	Sur-Fit Natura™ Bolsa de Urostomía con Válvula Accuseal™
Descripción	Bolsa recolectora para uso en urostomías, con válvula anti-reflujo, páneles de confort del lado de la piel del paciente y válvula de drenaje Accuseal.
Marca	Natura™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	Bolsas: Lámina de la bolsa: etilenvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas); panel de confort: fibra de polietileno / polietilentereftalato; pestaña: etilenvinil acetato.
Características y Acciones del Producto	• Protección de la piel: Las bolsas del sistema Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones. También están disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente. • Sistema de cierre: el sistema de cierre Accuseal permite una fácil manipulación y drenaje de los líquidos • Válvula antirreflujo: en las bolsas de urostomía, permite el flujo de los líquidos en una única dirección, evitando salpicaduras e infecciones.
Usos	Ostomías urinarias
Recomendaciones de Uso	Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo. • Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas. • Cierre la válvula de drenaje antes de la aplicación de la bolsa • Drene cuando la bolsa tenga un contenido entre 1/3 y 1/2 • Deje la bolsa adherida al abdomen. • Posicione la bolsa sobre el sanitario o el receptáculo • Remueva la tapa de seguridad de la parte inferior de la válvula. Gire la palanca de manera que se observe el punto rojo y la orina empiece a fluir.
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
Presentaciones:	Caja x 10 bolsas con pestaña de los siguientes tamaños: 32mm 38mm 45mm 57mm 70mm



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BOLSAS DE UROSTOMÍA SURFIT NATURA™ CON VÁLVULA ACCUSEAL™**

Calificación de 1 a 5:

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Sistema de acople a la barrera Natura	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Capacidad y tamaño de la bolsa	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Suavidad del panel de confort	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Facilidad de remoción	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Duración	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Comodidad para el paciente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Facilidad de uso de la válvula Accuseal™	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Seguridad de la válvula Accuseal™	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Empaques	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Claridad de las instrucciones de uso	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Presentación	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5 ☐	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					