AND-FIC-GCR-037 V.01 23/ago/2023

### **SUR-FIT PLUS®**

Bolsa de de urostomía

### **DESCRIPCIÓN**

Bolsa recolectora de fluidos líquidos provista de un aro Sur-Fit Plus y un sistema de drenaje de válvula en su parte distal.



### **Componentes**

- Bolsa Recolectora de fluidos líquidos, elaborada en un plástico suave transparente (Five Ply Film).
- Cubierta en su parte posterior por un refuerzo en EMA, sus bordes están sellados y está provista de un aro Sur-Fit Plus flexible con ocho broches de contención.
- Está equipada con 5 válvulas antirreflujo y un sistema de válvula de vaciado.

### **Uso previsto**

Las barreras están indicadas para el manejo de excreciones de: Ostomías Urinarias:

- Vesicostomias
- Ureterostomías
- Derivaciones urinarias

### Características

- Protección de la Piel: La bolsa está cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad y aísla la piel del paciente evitando así irritaciones. Mantiene la piel seca y protegida.
- Bolsa Elaborada en Plástico resistente a fugas: Evita que los fluidos se filtren, y salgan los olores al exterior proporcionando así mayor Seguridad y comodidad al paciente.
- Ajuste perfecto: El aro Sur-Fit Plus provisto de ocho broches de contención permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Sur-Fit Plus minimizando los riesgos de desacoples accidentales.
- Sistema de drenaje seguro: La bolsa está provista de una válvula de drenaje flexible que cierra a presión y es fácil de manejar por el paciente.

### Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

- Elija la bolsa del mismo diámetro de la barrera protectora de piel Sur-Fit Plus.
- Para acoplar la bolsa a la barrera, comience embonando los aros por los bordes inferiores. Asegúrese que queden bien embonados
- Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente.
- Si la bolsa se perfora por alguna razón deséchela y use una nueva
- Verifique que la válvula de drenaje quede bien cerrada para evitar filtraciones
- NO utilizar esta bolsa en recolección de efluentes sólidos.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento		
Producto no estéril	Colombia: 2020DM-0022713 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: N/A	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.		

# Ficha Técnica

AND-FIC-GCR-037 V.01 23/ago/2023

# **SUR-FIT PLUS®**

Bolsa de de urostomía

N	Empaque Primario** Material de empaque: Bolsa de polietileno			
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
402550	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 45MM 1X10INT	NI/A	45.522	16
402551	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 57MM 1X10INT	N/A	15,5 x 33	

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.
- \*\*Empaque primario únicamente para Colombia

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
402550	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 45MM 1X10INT	00768455049950	175.724	240	10
402551	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 57MM 1X10INT	00768455049967	17 x 5,7 x 21	240	10

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
402550	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 45MM 1X10INT	10768455049957	F0.C 22.1 F2.0	6.3	24
402551	SURFIT+ PCH URO FUT STD CLR 57MM 1X10INT	10768455049964	50,6 x 23,1 x 53,8	6,3	24



### Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido Convatec Dominican Republic – República Dominicana



#### Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA CONVATEC ECUADOR S.A. CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

### Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

\*Consultar registro sanitario de cada país

FUENTE: Datafile Convatec