

LITTLE ONES™

Bolsa drenable de una pieza, de corte a la medida, con barrera cutánea Stomahesive®
Sistema de una pieza bolsa drenable de ostomía Active-Life

DESCRIPCIÓN

La bolsa drenable y personalizable ConvaTec LITTLE ONES™ es una bolsa de una pieza con barrera cutánea adhesiva Stomahesive.



Características

- Cualidades protectoras de la piel similares a las ofrecidas por la barrera cutánea Stomahesive®, modificadas para no dañar la piel.
- Orrificio inicial que puede agrandarse para aceptar estomas de cualquier tamaño y forma de hasta 50 mm (2") de diámetro.
- Panel posterior similar a una tela para mayor comodidad.
- Película de barrera contra el olor suave y discreta.
- Pinza de cierre suave y moldeable diseñada para uso pediátrico (neonatos, lactantes, niños y adolescentes)

Componentes

Barrera masa adhesiva: Carboximetilcelulosa de Sodio, Gelatina, Pectina, Poliisobutileno LMMH, Poliisobutileno (L100), papel de liberación en Silicona, Película en relieve en polietileno, Película Five Ply, Material de Respaldo en polietileno

Uso previsto

Esta bolsa es específicamente diseñada para uso pediátrico (neonatos, lactantes, niños y adolescentes).

Precauciones

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía plana, especialmente cuando se asocie a megauréteres y ausencia de un depósito urinario.

En raros casos, se han documentado estudios clínicos sobre la presencia del adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. Si se descubre una masa en las vías urinarias, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e instituir las medidas clínicas apropiadas.

LITTLE ONES™

Bolsa drenable de una pieza, de corte a la medida, con barrera cutánea Stomahesive®
Sistema de una pieza bolsa drenable de ostomía Active-Life

Instrucciones de uso

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Mida el estoma con la guía proporcionada. Limpie suavemente el área con agua y séquela suavemente, sin frotar. La piel periestomal DEBE estar libre de disolventes o sustancias grasosas.
2. Trace el tamalo del estoma en el papel blanco posterior, centrándose alrededor del orificio inicial.
3. IMPORTANTE: Antes de cortar, separe los paneles frontal y dorsal para no cortar el panel frontal de la bolsa.
4. Usando tijeras curvas, agrande el orificio central hasta un tamaño levemente mayor que el trazado. NO corte más allá del círculo en el papel desprendible.

COLOCACIÓN DE LA PINZA DE CERRADO

(a) Importante que la pinza de cerrado se aplique tal como se describe para evitar pérdidas.

(b) Coloque la pinza de cerrado antes de colocar la bolsa en el cuerpo.

5. Retire el papel desprendible de la tira adhesiva de la pinza de cerrado. Coloque el dispositivo aproximadamente a 0,6 cm (1/4") del extremo de la pinza de la bolsa, en el lado de la bolsa son la barrera cutánea. Presione en su lugar.
6. Doble firmemente la pinza de la bolsa hacia arriba 4 veces.
7. Doble firmemente los extremos de la pinza de cerrado, hacia el lado de la bolsa con la barrera cutánea, asegurándose que la pinza quede lisa, plana y sin arrugas.

COLOCACIÓN DE LA BOLSA

IMPORTANTE: Se debe tener cuidado de ejercer sólo una presión suave sobre el abdomen del lactante cuando se coloque cualquier sistema de bolsas.

8. Retire el papel desprendible de la barrera cutánea evitando lo más posible el contacto del dedo con el adhesivo.
NOTA: Cuando se use la pasta Stomahesive®, se recomienda aplicarla como un anillo alrededor del orificio agrandado en el lado adhesivo de la barrera cutánea.
9. Sostenga los dos lados de la barrera cutánea y coloque el orificio agrandado sobre el estoma.
10. Presione suavemente la barrera contra la piel, prestando atención especial al área más cercana al estoma. La bolsa puede usarse mientras sea cómoda y no haya señales de irritación.

REMOCIÓN DE LA BOLSA

11. La remoción se puede realizar desde arriba hacia abajo, tirando suavemente de la barrera cutánea para separarla de la piel, mientras se aplica una presión ligera con la mano libre sobre la piel adyacente. No es necesario quitar todo el residuo.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2022DM-0025148 Ecuador: 2041-DME-0716 Perú: DM7140E	5 años	Mantener a temperaturas entre 10°C y 30°C. Proteger de la humedad.

LITTLE ONES™

Bolsa drenable de una pieza, de corte a la medida, con barrera cutánea Stomahesive®
Sistema de una pieza bolsa drenable de ostomía Active-Life

Empaque Primario**
Material de empaque: bolsa de polietileno

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
20922	LITTLE ONES bolsa	N/A	15 x 21	16

** Aplica solo para Colombia.

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
20922	LITTLE ONES bolsa	768455101399	21,5 x 15,4 x 5,3	300	15

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
20922	LITTLE ONES bolsa	10768455101396	45 x 33 x 55	12,5	40



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido
ConvaTec Dominican Republic, Inc –
República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec