

ACTIVE LIFE®

Bolsa Drenable De Una Pieza Con Barrera Stomahesive® Transparente

DESCRIPCIÓN

Las bolsas ActiveLife® son dispositivos no invasivos diseñados para recoger la salida de un estoma (ileostomía y colostomía). Las bolsas de una pieza se adhieren directamente a la piel a través de su barrera cutánea integral de Stomahesive. Las bolsas drenables tienen su extremo abierto para el drenaje fecal.



Características

- Contiene el efluente sin fugas
- Discretos, con poco ruido y olor
- Fácil de vaciar y el cierre de la cola es fácil de limpiar
- No provocan reacciones cutáneas y protegen la piel periestomal
- Fácil de poner y quitar, bolsa cómoda
- Mantiene la adherencia a la piel durante el tiempo requerido
- La película transparente permite al usuario evaluar el volumen, el tipo de salida y permite la visualización del estoma.
- La película transparente es ideal para el uso institucional, ya que permite visualizar tanto el efluente como el estado del estoma.

Componentes

Barrera protectora de piel Stomahesive: 2 mm de espesor, compuesta por tres hidrocoloides: carboximetilcelulosa de Sodio, Gelatina, Pectina, Poliisobutileno.

Bolsa recolectora de PVC y EVA con panel poroso protector en su cara posterior. Escudo protector de la barrera en PVC, Etiqueta con guía de corte, Película Five Ply, Material de Respaldo Polietileno, Laminado en Polietileno, Papel de liberación en Silicona, Soporte en Polietileno no tejido con acrílico adhesivo.

Uso previsto

Para el manejo de las descargas del estoma.

Indicaciones de uso

PREPARACIÓN DE LA BOLSA

La piel alrededor del estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas.

En el caso de bolsas con abertura de estoma precortada:

Seleccione una bolsa con una abertura de estoma precortada que sea al menos $\frac{1}{8}$ de pulgada (3 mm) más grande que el diámetro mayor del estoma.

NO agrande la abertura de estoma precortada.

Retire el protector de material plástico del disco Stomahesive®.

Para bolsas cortadas a la medida:

Mida el estoma usando la guía adjunta.

Retire el protector de material plástico del disco Stomahesive®.

Antes de cortar, separe los paneles frontal y trasero.

Usando las guías en el papel de soporte, corte el orificio central al mismo tamaño que el estoma. No corte más allá de la última línea.

APLICACIÓN DE LA BOLSA

Retire el papel de soporte (ver imágenes en Instrucciones de Uso). Verifique que la adaptación alrededor del estoma esté bien ceñida.

USO DEL CIERRE DE COLA

RETIRO DE LA BOLSA

Este producto no necesita quitarse durante el baño, la ducha o la natación, Seque dando palmaditas después de exponerlas al agua.

DISPOSICIÓN

Se debe cumplir con los requisitos o reglamentaciones locales para disposición de residuos.

ACTIVE LIFE®

Bolsa Drenable De Una Pieza Con Barrera Stomahesive® Transparente

Precauciones

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en la sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2022DM-0025371 Ecuador: 1965-DME-0616 Perú: DM11624E	5 años	Almacenar a temperatura entre 10°C - 30°C/50°F - 86°F. Mantener en lugar seco.

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Material de empaque: bolsa de polietileno

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
22771	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST	N/A	15 x 21	16
125371	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST			

** Aplica solo para Colombia.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
22771	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST	768455101610	21,5 x 15,4 x 5,3	325	10
125371	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST 10 und + 10 pinzas	00768455109326	21,5 x 15,4 x 5,3	320	10

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
22771	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST	10768455101617	45 x 33 x 55	13,7	14
125371	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST 10 und + 10 pinzas	10768455109323	45 x 33 x 55	14	14



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido
ConvaTec Dominican Republic, Inc –
República Dominicana

*Consultar registro sanitario de cada país

Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.

ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec. Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile Convatec

ACTIVE LIFE®

Bolsa Drenable De Una Pieza Con Barrera Stomahesive® Transparente

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTORIZADO / ELABORADO POR	FECHA DEL CAMBIO
01	Primera emisión	Jesica Rojas QA Engineer II	15-jul-2023
02	Inclusion de referencia 125371 ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST 10 und + 10 pinzas	Ángela Mazón Analyst RAQA	5-sep-2023