

SUR-FIT PLUS® LITTLE ONES®

Sistema de Ostomías de Dos Piezas para niños

DESCRIPCIÓN

Sistema de dos piezas para ostomías digestivas pediátricas

Componentes

- Barrera con collar Flexible para Niños: Compuesta de Carboximetilcelulosa Sódica, pectina, gelatina, con un collar adhesivo externo microporoso hipoalergenico de color blanco.
- Bolsa Recolectora: elaborada en un plástico suave (Five Ply Film), cubierta en su parte posterior con un refuerzo en EMA. Está provista de un aro Sur-Fit Plus Flexible con ocho broches de contención.

Uso previsto

Las barreras están indicadas para el manejo de excreciones de:
Ostomías Digestivas:

- Ileostomías
- Yeyunostomías
- Colostomías

Características

- Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar el tejido irritada.
- Adhesión seco a Húmedo: se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel íntegra y protegida.
- Ajuste Perfecto: sistema de acople con broches de retención que minimizan los riesgos de desacoples accidentales de la barrera y la bolsa
- Barreras Protectoras con adhesivo microporoso: adaptables a los diferentes tipos de abdomen. Adhesivo hipoalergénico.
- Bolsa Elaborada en Plástico transparente Resistente a Fugas: Segura y cómoda para el niño.
- La bolsa está cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando así irritaciones de la piel. Mantiene la piel seca y protegida.
- Pinza de cierre flexible: Banda de cierre flexible recubierta por una espuma que protege al niño para que no se lesione. Una pinza por cada bolsa.

Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

- Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante
- Limpieza de la piel circundante con agua limpia y jabón suave
- Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periestomal
- Elegir la barrera de un tamaño de aro que sobrepase por lo menos 10mm el tamaño del diámetro del estoma
- Ampliar el orificio de la barrera protectora Stomahesive al tamaño del estoma.
- Aplicar pasta Stomahesive o polvo Stomahesive según necesidad
- Aplicar la Barrera sobre la piel haciendo un masaje sobre está para asegurar su fijación
- Elegir la bolsa del mismo diámetro de la barrera protectora de piel SurFit Plus
- Para acoplar la bolsa a la barrera, comience embonando los aros por los bordes inferiores.
- Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente.
- Si la bolsa se perfora por alguna razón deséchela y use una nueva
- Coloque la pinza flexible en la parte distal de la bolsa enrollándola para mayor seguridad



SUR-FIT PLUS® LITTLE ONES®

Sistema de Ostomías de Dos Piezas para niños

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2020DM-0022713 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: DM11689E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Emque Primario**

Material de empaque: Bolsa de polietileno

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
125016	LITTLE ONES WFR FLEX 32MM (1X5PK) INT	N/A	15 x 21	16
125017	LITTLE ONES WFR FLEX 45MM (1X5PK) INT			
402566	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 32MM (1X10)INT			
402567	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 45MM (1X10)INT			

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.
- **Empaque primario aplica únicamente para

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
125016	LITTLE ONES WFR FLEX 32MM (1X5PK) INT	00768455049363	12,7 x 5,2 x 12,7	120	5
125017	LITTLE ONES WFR FLEX 45MM (1X5PK) INT	00768455049370			
402566	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 32MM (1X10)INT	00768455049387	15 x 5,1 x 21	140	10
402567	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 45MM (1X10)INT	00768455049394			

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
125016	LITTLE ONES WFR FLEX 32MM (1X5PK) INT	10768455049360	13,8 x 26,3 x 53,6	2,7	20
125017	LITTLE ONES WFR FLEX 45MM (1X5PK) INT	10768455049377			
402566	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 32MM (1X10)INT	10768455049384	39,5 x 32,1 x 32,7	6,5	14
402567	SURFIT+ L/ONE PCH DRN CLR 45MM (1X10)INT	10768455049391			



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana

*Consultar registro sanitario de cada país



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec