

ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER WIPES STING FREE
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE TOALLITAS

DESCRIPCIÓN

Toallitas para proteger la piel sin irritaciones ESENTA™



Características

- Protege la piel hasta por 72 horas.
- Fórmula basada en silicona.
- Crea una barrera transpirable que protege la piel de los daños causados por adhesivos, residuos corporales y enzimas.
- Fácil de aplicar y retirar.
- No acumulan residuos, ni se adhieren a los pliegues de la piel.
- Se seca en rápidamente (en 30 segundos) para formar una película duradera de silicona.
- Se recomienda aplicar cada 12-72 horas, dependiendo de las condiciones de la superficie de la piel.
- Seguro y eficaz incluso con uso frecuente.
- Crea una superficie limpia sin afectar la adhesión del próximo material o apósito.
- Alivia la piel enrojecida y dolorida.
- Reduce el picor.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5
- Amigable con el medio ambiente.

Componentes

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO
5% Trimethylated Silica, TMS
(Trimethylsiloxysilicate)
0,25% Zanthalene

Uso previsto

Protección de la piel frente a los daños asociados a los desechos corporales, enzimas y adhesivos.

Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel y séquela bien.
2. Desgarre el sobre para abrirlo y despliegue la toallita.
3. Limpie suavemente el área que se va a proteger y espere hasta que se seque.

Precauciones

- Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección y contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto. Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas, y la legislación y los reglamentos locales.
- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Solo para uso externo.
- ADVERTENCIA: Muy inflamable.

ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER WIPES STING FREE
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE TOALLITAS

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2021DM-0024229 Ecuador: 12572-DME-1221 Perú: DM22741E	4 años	Protéjase contra la exposición externa, como altas temperaturas. Radiación UV / luz solar.

Empaque Primario
Material de empaque: Plástico y papel

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
423282	ESENTA™ sting free skin barrier wipes	N/A	8 cm x 0,2 cm x 6 cm	3

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
423282	ESENTA™ sting free skin barrier wipes	768455170029	10,2 cm x 6 cm x 8,4 cm	100	30

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
423282	ESENTA™ sting free skin barrier wipes	10768455170026	21,5 cm x 32 cm x 18 cm	3,1	20

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited – Reino Unido
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.

**ConvaTec Limited**

First avenue, Deeside Industrial
Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile ConvaTec