

GENTLECATH™ GLIDE

CATÉTER URINARIO INTERMITENTE GENTLECATH GLIDE
GENTLECATH GLIDE INTERMITENT URINARY CATHETER

DESCRIPCIÓN

GentleCath™ Glide son dispositivos estériles destinados a ser utilizados como catéteres urinarios intermitentes en pacientes que necesitan drenar la orina de su vejiga. El tubo del catéter está hecho de elastómero termoplástico (TPE) con aditivos hidrofílicos que activan y lubrican el catéter cuando se moja. El eje del catéter se introduce dentro de la uretra del paciente y la orina se drena a través del tubo. Los catéteres se desechan después de su uso y no permanecen in situ.



Características

- Diseñado para una cateterización hidrofílica cómoda y de baja fricción, con menos residuos sucios
- Con una superficie suave y resbaladiza diseñada para facilitar la experiencia de sondaje
- Sólo hay que romper la bolsita para cubrir la sonda con agua y ya está lista para su uso
- La tecnología FeelClean™ está diseñada para reducir los residuos que deja la sonda
- Diseñado para reducir los residuos y la suciedad asociados a las sondas hidrofílicas recubiertas, para que los usuarios puedan preocuparse menos de que queden residuos en la ropa, las manos y el cuerpo
- Diseñado con una manga de manipulación para no tocar la sonda, lo que ayuda a evitar la contaminación del catéter
- Las sondas no están fabricadas con DEHP
- No incorpora componentes a base de látex

Componentes

Catéter/tubo: 95% Termoplastomero (TPE), 5% Techsurf 15560

Embudo: cloruro de polivinilo con tereftalato
Sobre para agua estéril: PET/ A1/laminado de PE pelable

Contenido del sobre: agua purificada estéril
Manga de manipulación: polietileno de baja densidad y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con colorante azul

Punto pegajoso: Polímero bi-adhesivo

Uso previsto

Los catéteres intermitentes están indicados para los drenajes transitorios rutinarios de la vejiga. El catéter se inserta en la uretra

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos.
2. Limpiar el área (genitales) donde será introducido el catéter.
3. Tomar el catéter y presionar la bolsa de aluminio para romperla.
4. Mover el catéter para asegurar que el agua liberada toque toda la superficie del catéter.
5. Abrir el empaque por la parte superior.
6. Tomar el catéter por la manga.
7. Insertarlo de acuerdo a las instrucciones de uso dentro del empaque.
8. Drenar la orina.
9. Extraer el catéter.
10. Desechar el catéter.

GENTLECATH™ GLIDE

CATÉTER URINARIO INTERMITENTE GENTLECATH GLIDE
GENTLECATH GLIDE INTERMITENT URINARY CATHETER

Precauciones

- Comprobar la integridad del catéter antes de la inserción y comprobar igualmente que sea del tamaño adecuado según se indica en el envase.
- Si es necesario, seleccionar otro catéter.
- No utilizar si el envase ya ha sido abierto o si está dañado.
- Si es necesario, conectar una bolsa de orina en el extremo del embudo del catéter antes de utilizarlo.
- No tocar la punta del catéter y utiliza el mango anticontacto para minimizar el contacto con el resto del catéter.
- Apretar la bolsita de agua para romperla dentro del envase, cubrir la parte insertable en agua y utilizar en el transcurso de 2 minutos.
- Deslizar siempre el catéter con lentitud y suavidad al introducirlo o retirarlo. Nunca forzar el catéter.
- Al retirar el catéter, parar si empieza a fluir orina. Continuar cuando se detenga.
- La pegatina azul que se encuentra en la parte trasera del envase puede utilizarse para fijar este último a una superficie mientras se utiliza el catéter.
- Si no hubiese buena diuresis u otro tipo de complicación (ej., dolor, difícil inserción o retirada, sangrado, signos de infección en el tracto urinario o secreción), consulte a un profesional de la salud.
- Tras una inserción incorrecta, el catéter deberá desecharse y no reutilizarse. Se deberá seleccionar un catéter nuevo.
- Los catéteres usados siempre deberán desecharse

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto estéril	Colombia: INVIMA 2020DM-0022440 Ecuador: 10725-DME-1120 Perú: DM22371E	3 años	Almacene a temperatura ambiente (10º C - 25º C) Mantenga el producto seco. Proteger de la luz solar.

Empaque Primario				
Material de empaque: Plástico y papel				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
421570	GentleCath Glide, female CH08 	30768455153726	26 cm x 3,7 cm x 2,5 cm	14
421571	GentleCath Glide, female CH10 	30768455151616		
421572	GentleCath Glide, female CH12 	30768455151623		
421573	GentleCath Glide, female CH14 	30768455151630		
421574	GentleCath Glide, female CH16 	30768455151647		
421564	GentleCath Glide, male CH08 	30768455153702	49 cm x 3,7 cm x 2 cm	23
421565	GentleCath Glide, male CH10 	30768455151579		
421566	GentleCath Glide, male CH12 	30768455151586		
421567	GentleCath Glide, male CH14 	30768455151593		
421568	GentleCath Glide, male CH16 	30768455151609		
421569	GentleCath Glide, male CH18 	30768455153719		
421907	GentleCath Glide, Tiemann CH08 	30768455153733		

GENTLECATH™ GLIDE

CATÉTER URINARIO INTERMITENTE GENTLECATH GLIDE
GENTLECATH GLIDE INTERMITENT URINARY CATHETER

421908	GentleCath Glide, Tiemann CH10 ●	30768455153740
421909	GentleCath Glide, Tiemann CH12 ○	30768455153757
421910	GentleCath Glide, Tiemann CH14 ●	30768455153764
421911	GentleCath Glide, Tiemann CH16 ●	30768455153771
421912	GentleCath Glide, Tiemann CH18 ●	30768455153788

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

Material de empaque: Caja plegada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
421570	GentleCath Glide, female CH08 	7708121986335	26,5 cm x 9,8 cm x 15 cm	500	30
421571	GentleCath Glide, female CH10 	7708121986557			
421572	GentleCath Glide, female CH12 	7708121986731			
421573	GentleCath Glide, female CH14 	7708121986854			
421574	GentleCath Glide, female CH16 	-			
421564	GentleCath Glide, male CH08 	7708121986090	49,7 cm x 14,9 cm x 9,6 cm	770	
421565	GentleCath Glide, male CH10 	7708121986144			
421566	GentleCath Glide, male CH12 	7708121986960			
421567	GentleCath Glide, male CH14 	7708121986014			
421568	GentleCath Glide, male CH16 	7708121986663			
421569	GentleCath Glide, male CH18 	-			
421907	GentleCath Glide, Tiemann CH08 	-			
421908	GentleCath Glide, Tiemann CH10 	-			
421909	GentleCath Glide, Tiemann CH12 	7708121986533			
421910	GentleCath Glide, Tiemann CH14 	7708121986236			
421911	GentleCath Glide, Tiemann CH16 	7708121986571			
421912	GentleCath Glide, Tiemann CH18 				

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
421570	GentleCath Glide, female CH08 ●	70768455153724	28 cm x 39,5 cm x 31,5 cm	3,8	8
421571	GentleCath Glide, female CH10 ●	70768455151614			
421572	GentleCath Glide, female CH12 ○	70768455151621			
421573	GentleCath Glide, female CH14 ●	70768455151638			

GENTLECATH™ GLIDE

CATÉTER URINARIO INTERMITENTE GENTLECATH GLIDE
GENTLECATH GLIDE INTERMITENT URINARY CATHETER

421574	GentleCath Glide, female CH16	●	70768455151645	50 cm x 39,8 cm x 31,3 cm	6,8
421564	GentleCath Glide, male CH08	●	70768455153700		
421565	GentleCath Glide, male CH10	●	70768455151577		
421566	GentleCath Glide, male CH12	○	70768455151584		
421567	GentleCath Glide, male CH14	●	70768455151591		
421568	GentleCath Glide, male CH16	●	70768455151607		
421569	GentleCath Glide, male CH18	●	70768455153717		
421907	GentleCath Glide, Tiemann CH08	●	70768455153731		
421908	GentleCath Glide, Tiemann CH10	●	70768455153748		
421909	GentleCath Glide, Tiemann CH12	○	70768455153755		
421910	GentleCath Glide, Tiemann CH14	●	70768455153762		
421911	GentleCath Glide, Tiemann CH16	●	70768455153779		
421912	GentleCath Glide, Tiemann CH18	●	70768455153786		

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited - Reino Unido
UNOMEDICAL S.R.O. - Eslovaquia

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile ConvaTec