

STOMAHESIVE® PASTA PROTECTORA

Stomahesive® Paste Protective
Skin Barrier and Filler

DESCRIPCIÓN

- La pasta Stomahesive es un relleno, sellador y barrera protectora cutánea conveniente y altamente eficaz.



Características

- Adhesividad:** La pasta Stomahesive® facilita la adhesión de las barreras protectoras de piel Stomahesive® en zonas irregulares del abdomen, asegurando una mayor duración de la misma.
- Moldeabilidad:** La pasta Stomahesive® permite rellenar y nivelar irregularidades del abdomen para evitar filtraciones del efluente. Se utiliza sobre la piel peri y paraostomal o cualquier otra zona del abdomen que se requiera nivelar para poder colocar la Barrera protectora y así evitar que el drenaje del estoma lesione la piel.
- Sustancias Hipoalergénicas:** no se han reportado casos de sensibilidad a los componentes de la pasta Stomahesive, lo que permite utilizarla en pacientes con piel sensible.

Componentes

Gantrez ES-425, triacetato de glicerilo, Alcohol Etílico USP, Premezcla Stomahesive (carboximetilcelulosa sódica, gelatina, pectina, tri 12 hidroxistearato de glicerilo)

Uso previsto

La pasta se usa como relleno, sellador y barrera protectora cutánea para uso alrededor de estomas de colostomía, ileostomía o urostomía.

También puede usarse para proteger la piel expuesta alrededor de sitios de fístula, entre la base de un estoma y la abertura de la barrera cutánea, y como relleno para pliegues de piel, superficies cutáneas irregulares y cicatrices.

Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

APLICACIÓN A LA BARRERA CUTÁNEA

- Prepare la barrera cutánea según se describe en las Instrucciones de Uso incluidas con la barrera cutánea.
- Aplique un círculo de pasta en el dorso de la barrera cutánea, alrededor del agujero. No esparza la pasta. Espere un minuto antes de aplicar la barrera cutánea.
- Para mejores resultados, oprima el tubo desde abajo hacia arriba.

APLICACIÓN A LA PIEL

- Aplice la pasta Stomahesive para rellenar depresiones y contornos cutáneos irregulares. De ser necesario, use un dedo humedecido o espátula para esparcir la pasta uniformemente.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Aplice la barrera cutánea y presiónela firmemente hacia abajo alrededor de la base del estoma.
- Podrá aplicarse pasta adicional para mayor protección de la piel alrededor del estoma en cualquier momento.

STOMAHESIVE® PASTA PROTECTORA

Stomahesive® Paste Protective
Skin Barrier and Filler

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2017DM-0016718 Ecuador: 1075-DME-0615 Perú: DM14315E	5 años	Consérvese a temperatura 10°C hasta 30°C, manténgase bien tapado.

Empaque Primario Material de empaque: Tubo aluminio / polietileno 2oz – 56,7g				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso Total (g)
183910	STOMAHESIVE PASTE (1TUBEX56.7G) INT	00768455150793	3,7 x 13 x 3,7	60

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
183910	STOMAHESIVE PASTE (1TUBEX56.7G) INT	00768455100019	14,9 x 3,1 x 3,8	77,18	1

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
183910	STOMAHESIVE PASTE (1TUBEX56.7G) INT	10768455100016	35 x 21,4 x 17,5	2,8	35

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited – Reino Unido

*Consultar registro sanitario de cada país

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec. Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile ConvaTec