

STOMAHESIVE® POLVO PROTECTOR

Stomahesive® protective powder

DESCRIPCIÓN

Polvo para protección de la piel peri y paraostomal con hidrocoloides para la regeneración de piel



Características

- **Absorción:** las sustancias naturales hidrocoloides del Polvo Stomahesive®, tienen capacidad de absorber la humedad presente en la superficie de la piel excoriada o irritada, permitiendo la fácil adhesión de la barrera protectora de piel.
- **Regeneración de Tejido:** los hidrocoloides han demostrado gran capacidad para regenerar el tejido dañado.
- **Sustancias Hipoalergénicas:** no se han reportado casos de sensibilidad a los componentes del polvo Stomahesive®, lo que permite utilizarlo en pacientes con piel sensible.
- El polvo también puede usarse para rellenar espacios entre el estoma y la barrera protectora para la piel.

Componentes

Protector cutáneo compuesto de hidrocoloides:
Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina – Gelatina.

Uso previsto

Polvo para protección de la piel. Ayuda a absorber la humedad mejorando la posible irritación cutánea, previniendo las fugas y favoreciendo una mayor permanencia del apósito.

Para protección de la piel excoriada o irritada alrededor de estomas, fístulas enterocutáneas, heridas que drenan. Protección frente a las lesiones de la piel asociadas a la humedad que están causadas por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad (orina, heces, transpiración, exudado de las heridas, moco, saliva, etc.)

Precauciones

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía plana, especialmente cuando se asocie a megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raros casos, se han documentado estudios clínicos sobre la presencia del adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. Si se descubre una masa en las vías urinarias, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e instituir las medidas clínicas apropiadas.

Instrucciones de uso

- Limpie el área que va a proteger.
- Espolvóreela ligeramente y retire cualquier exceso.
- Coloque la Placa o el producto que vaya a utilizar.

STOMAHESIVE® POLVO PROTECTOR

Stomahesive® protective powder

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2015DM-001389-R2 Ecuador: 1724-DME-0216 Perú: DM7737E	3 años	Consérvese a temperatura ambiente, manténgase bien tapado.

Empaque Primario

Material de empaque: Frasco de polietileno de densidad media con termoformado de cloruro de polivinilo

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
25510	STOMAHESIVE POWDER (1BTLX29G) US	768455108268	4 x 4 x 10	47,5

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario**

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
25510	STOMAHESIVE POWDER (1BTLX29G) US	768455108268	3,9 x 3,8 x 10,23	60	1

** Aplica solo para Ecuador.

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
25510	STOMAHESIVE POWDER (1BTLX29G) US	10768455108265	32 x 24 x 13	2,5	48



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido

*Consultar registro sanitario de cada país



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec. Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile ConvaTec