

ESENTA™

ESENTA™ ADHESIVE REMOVER SPRAY 50mL STING FREE
ELIMINADOR DE ADHESIVO ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL

DESCRIPCIÓN

ESENTA™ Spray (50 mL) para remover adhesivos, apósitos, materiales y dispositivos que se usan sobre la piel.



Características

- Sistema Bag-on-Valve (BoV): Diseñado para no obstruirse cuando se utiliza boca abajo o invertido. Rocía en cualquier ángulo. La nueva tapa puede girar en cualquier dirección para mejorar su uso.
- No causa un choque de frío en la piel de los usuarios.
- Formulación 100% silicona, sedosa y suave al tacto.
- Ayuda a minimizar el desprendimiento de la piel.
- Seca rápidamente (en 30 segundos) sin dejar residuos.
- Libera rápidamente los accesorios o apósitos adheridos a la piel.
- No causa escozor.
- Protege la piel de los efectos nocivos de los adhesivos: irritación, enrojecimiento, acumulación de residuos.
- Elimina rápidamente los residuos de adhesivos.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5.
- Amigable con el medio ambiente.

Componentes

99% Hexamethyldisiloxane HMDSO
1% Octamethyltrisiloxane

Uso previsto

Eliminación de adhesivos, apósitos, materiales y dispositivos que se usan sobre la piel.

Instrucciones de Uso

1. Pulverice alrededor del borde del adhesivo y espere unos segundos.
2. Despegue suavemente el adhesivo de la piel con más vaporizador para facilitar la extracción, si es necesario.

ESENTA™

ESENTA™ ADHESIVE REMOVER SPRAY 50mL STING FREE
ELIMINADOR DE ADHESIVO ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL

Precauciones

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.

ADVERTENCIAS

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- MUY INFLAMABLE

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2021DM-0024336 Ecuador: 12571-DME-1221 Perú: DM22555E	4 años	No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Empaque Primario
Material de empaque: lata de aluminio

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
423289	ESENTA™ Adhesive Remover Spray 50ml	N/A	3,4 x 3,4 x 13	65

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
423289	ESENTA™ Adhesive Remover Spray 50ml	768455170135	3,8 x 3,8 x 13,8	75	1

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
423289	ESENTA™ Adhesive Remover Spray 50ml	10768455170132	16 x 12,5 x 15	900	12

ESENTA™

ESENTA™ ADHESIVE REMOVER SPRAY 50mL STING FREE
ELIMINADOR DE ADHESIVO ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido
AURENA LABORATORIES AB - Suecia



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec