



FICHA TÉCNICA: GASA Y VENDAJE DE TELA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIONES COMERCIALES

- GASA ESTÉRIL 45X45 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 SBX2 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 SBX5 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 10X10 SBX3 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 10X10 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 23X45 SBX3 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 23X45 SBX3 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 23X45 SBX5 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 45X15 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 45X45 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 45X45 SBX5 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 45X45 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32P SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX2 MS
- GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 70X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 30X10 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 40X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 40X90 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 40X90 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 45X15 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 45X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 16 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 16 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 16 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 45X90 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL 50X45 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 60X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 60X90 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 60X90 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 8X6 SBX4 MS
- GASA NEONATAL 35X20 SBX5 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 10X10 SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL LAMINECTOMIA 5X11 SBX1 MS
- GASA ESTÉRIL 10X10 32P SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 20X12 RADIOPACO SBX10
- GASA ESTÉRIL 50X45 SBX3 MS
- GASA ESTÉRIL LAMINECTOMIA 5X11 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 20X12 RADIOPACO SBX10
- GASA MANO ESTÉRIL 4X22 SBX5
- GASA ALEMANA ESTÉRIL 11X12.5 SBX1
- GASA DOBLE ESTÉRIL 45X22.5 SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 15X15 SBX2 MS
- GASA ESTÉRIL 45X90 32P SBX10 MS
- GASA DOBLE ESTÉRIL 10X10 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 45X90 RP SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 90X45 SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 90X45 SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 45X22.5 SBX4 MS
- GASA ESTÉRIL 60X90 RP SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 60X90 RP SBX5 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 RP SBX10 MS
- GASA ESTÉRIL 30X45 RP SBX4 MS
- GASA MECHA NASAL ESTERIL SB X 2 MS**

MARCA Y FABRICANTE	MECHA DE GASA GINECOLOGICA RP ESTERIL SBXI	
REGISTRO SANITARIO	Medical Supplies Corp. S.A.S	
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2	
CLASIFICACIÓN RIESGO	29/11/2026	
TIPO DE GASA	IIa	
	VII	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		
ASPECTO	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.	
COLOR	Blanco	
OLOR	Inoloro	
ANÁLISIS FISCOQUÍMICO		
COMPOSICIÓN	Hilaza de algodón 100%	
PODER ABSORBENTE (SEG.)	Máximo 30	
RESIDUO DE IGNICIÓN (%)	Máximo 0,825	
MATERIA GRASA (%)	Máximo 0,7	
PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA	Negativo	
ACIDEZ	Negativo	
ALCALINIDAD	Negativo	
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE	18 a 22	
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA	10 a 14	
PRUEBA DE ESTERILIDAD		
CALDO TIOGLICOLATO (32.5+ /- 2.5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
CALDO CASOY (22.5 +/-2.5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
LEGILACIÓN APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente	
EMPAQUE PRIMARIO	Papel Grado Médico	
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco.	
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	 CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA	 JULIANA ARANGO PONCE