



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN COLECTOR CON TIRA



Coloplast

Conveen con Tira Adhesiva Security + Colector Urinario Masculino



- **Descripción**

Sistema para la recogida de orina de dos piezas. Incorpora una combinación exclusiva de ventajas funcionales, facilidad de uso, confort y economía.

- **Composición del Producto**

Estireno – etileno – butileno – estireno (SEBS), aceite natural

Tira Adhesiva: Polietileno (PE), papel siliconizado, adhesivo

- **Características y Acciones del Producto**

La tira adhesiva de doble cara mantiene un agarre firme, pero no constrictivo, esto significa que se mantiene a prueba de fugas durante 24 horas

Debido a la “**memoria**” del material, la tira adhesiva vuelve siempre a su tamaño y tensión iniciales

La elasticidad de la tira asegura que no se interrumpe el flujo sanguíneo del pene, tanto si está en reposo como agrandado, de modo que no se producen úlceras por presión



Realizada con un adhesivo hidrocoloide protector de la piel que absorbe la humedad, ofreciendo protección contra la irritación o maceración



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN COLECTOR CON TIRA



Coloplast

Lengüetas de liberación: Facilitan la extracción del papel protector de ambas caras de la tira

Está dotado de un **bulbo anti-acomodamiento** que asegura el flujo de orina, incluso cuando se dobla o tuerce

El colector está hecho con materiales protectores de la piel de la más alta calidad

Cuatro tamaños disponibles: asegurándose así la óptima fiabilidad gracias a una ajuste idóneo

Como no contiene látex en sus componentes, puede ser usado en pacientes con alergia o intolerancia al látex



- **Indicaciones**

- Incontinencia Urinaria Masculina
- Alergia o intolerancia al látex

- **Instrucciones de Uso**

1. Lave el pene limpiando primero la zona del meato, posteriormente la base y a continuación la zona púbica, testículos y por último la zona anal (siempre de adelante hacia atrás)
2. Seque las zonas en el mismo orden
3. Retire el papel protector de ambos lados de la tira y estírela suavemente para activar el adhesivo
4. Aplique la tira alrededor del pene al nivel de la base
5. Coloque el colector sobre el extremo del pene, la zona del fuelle del colector deberá permanecer libre
6. Desenrolle lentamente el colector hacia la base del pene pasando por encima de la tira adhesiva

 Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.	FICHA TÉCNICA CONVEEN COLECTOR CON TIRA	
--	--	---

7. Presione firmemente el colector contra la tira adhesiva
8. Conecte el colector a la bolsa de orina

- **Presentaciones**

- Referencia 5025: 25 milímetros de diámetro
- Referencia 5030: 30 milímetros de diámetro
- Referencia 5035: 35 milímetros de diámetro
- Referencia 5040: 40 milímetros de diámetro
- Unidad o Caja por 30 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2007DM-0000593 R1 vigente hasta 14/12/26
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año