



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA



Coloplast

Conveen Bolsa de Pierna

Bolsa Recolectora de Orina de Pierna Multicanal



- **Descripción**

Cuando la discreción es la máxima prioridad.

La bolsa de pierna multicanal ofrece la máxima intimidad. Ni la forma ni el sonido revelan su presencia, ofrece también un alto nivel de confort y una fiabilidad absoluta.

- **Composición del Producto**

Polipropileno, polietileno, PVC, poliéster

- **Características y Acciones del Producto**

Los multicanales interiores dispersan la orina, de modo que su peso y volumen quedan uniformemente distribuidos

Los canales mantienen un perfil muy plano y permiten que la bolsa envuelva la pierna, siendo así aún más cómoda y asegurando la isonorización e invisibilidad

La válvula de descarga proporciona un cierre hermético que no se afloja para evitar sorpresas desagradables, un chasquido audible indica el cierre total





Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA



Coloplast

El tubo está hecho de material transparente y altamente flexible que puede doblarse y torcerse sin interrumpir el flujo de orina, además es recortable

Dobles soldaduras para doble seguridad y unión segura al colector de orina

La válvula antiretorno evita el reflujo, asegurando una mayor higiene

Soporte suave de material no tejido permite la respiración de la piel, asegurando su comodidad

Disponibles correas de sujeción ajustables para las bolsas de pierna



- **Indicaciones**

- Incontinencia Urinaria y Ostomías Urinarias

- **Instrucciones de Uso**

1. Recorte el tubo con unas tijeras para elegir la longitud adecuada
2. Conecte el colector o Conveen a la bolsa de orina
3. Coloque la bolsa de orina sobre la pierna usando las correas de sujeción Conveen. En las esquinas de la bolsa hay una hendidura a través de la cual puede introducir el botón
4. Fije las correas al velcro asegurando que la bolsa quede en una posición cómoda y corte el exceso de elástico con unas tijeras
5. El tubito de vaciado cierra herméticamente, oirá un sonido característico de “click” que indicará el cierre correcto
6. Para vaciar la bolsa levante la palanquita del cierre. El tubo de salida es orientable para facilitar el vaciado en el inodoro



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN BOLSA DE PIERNA



Coloplast

- **Presentaciones**

- Referencia 5170: Bolsa de 600 cc y tubo de 45 cm. de longitud
Referencia 5174: Bolsa de 800 cc y tubo de 45 cm. de longitud
- Caja por 10 unidades
- Correas para las bolsas de pierna

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: TECNOLOGÍAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2007DM-0000593 R1 vigente hasta 14/12/26
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año