



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CONVEEN COLECTOR AUTOADHESIVO



Coloplast

Conveen Autoadhesivo

Colector Urinario Masculino



- **Descripción**

Sistema para la recogida de orina de una pieza. Con su fiabilidad absoluta y aplicación rápida, sencilla e higiénica, el colector ofrece ventajas a los usuarios y a los cuidadores

Ofrece un óptimo confort y protección de la piel.

- **Composición del Producto**

Caucho natural de látex, acrílico adhesivo, polietileno, silicona y polipropileno

- **Características y Acciones del Producto**

Se aplica cómoda y correctamente mediante el aplicador de fácil uso

El sistema de aplicación facilita su uso para el personal de enfermería y otros cuidadores sin contacto directo con el pene

También puede aplicarse el colector con guantes puestos

Adhesivo autocontenido proporciona un sello hermético durante 24 horas. No se tensará en torno al pene



Está dotado de un bulbo anti-acomodamiento que asegura el flujo de orina, incluso cuando se dobla o tuerce

FICHAS TÉCNICAS COLOPLAST A/S Y TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.

CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON **TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIAS S.A.S.**

CARRERA 19 No. 82-85 OFIC 301-302 BOGOTÁ D.C., TELF: 57+ (1)5082122. www.tm-colombia.com

 Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.	FICHA TÉCNICA CONVEEN COLECTOR AUTOADHESIVO	
--	--	---

El colector está hecho con materiales protectores de la piel de la más alta calidad

Aro de conexión: Su diseño exclusivo permite la unión segura entre el colector y la bolsa de recogida

Cuatro tamaños disponibles: asegurándose así la óptima fiabilidad gracias a una ajuste idóneo

- **Indicaciones**

- Incontinencia Urinaria Masculina

- **Instrucciones de Uso**

1. Lave el pene limpiando primero la zona del meato, posteriormente la base y a continuación la zona púbica, testículos y por último la zona anal (siempre de adelante hacia atrás)
2. Seque las zonas en el mismo orden
3. Coloque el colector sobre la punta del pene (justo después del glande), la zona del fuelle del colector deberá permanecer libre
4. Hale la tirilla y desenrolle a lo largo del pene
5. Realice una leve presión en torno a la zona del adhesivo
6. Retire el aplicador y conecte la bolsa de recolección de orina

- **Presentaciones**

- Referencia 5200: 25 milímetros de diámetro
Referencia 5205: 30 milímetros de diámetro
Referencia 5210: 35 milímetros de diámetro
Referencia 5215: 40 milímetros de diámetro
- Unidad o Caja por 30 unidades

 Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.	FICHA TÉCNICA CONVEEN COLECTOR AUTOADHESIVO	
--	--	---

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2007DM-0000593 R1 vigente hasta 14/12/26
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año