


FICHA TÉCNICA. GUIA HIDROFILICA ESTANDAR RECTA		Código – Referencia	
		AG-5041-3545	
		Edición	1
		Fecha	2021-08-18
Imagen			
Nombre	Guía Hidrofilica Estándar Recta		
Marca	AGS MEDTECH		
País de Fabricación	China		
Registro INVIMA	2021DM-0024092		
Descripción	Dispositivo diseñado para proporcionar una herramienta que permita al médico especialista realizar la canulación de la vía biliar y/o pancreática		
Materiales de Composición	Politetrafluoroetileno, Nitinol, Polivinilpirrolidona Grado Médico, Acrilonitrilo, Polietileno, Aceite de silicona		
Características	AG-5041-3545 , Longitud de trabajo 4500 mm, Diámetro: 0.035 pulgadas, Tipo: Recta.		
Presentación	Empaque estéril sellado		
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable
			Clasificación
			Ila
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.		
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Caja por 10 unidades.		
Instrucciones de Uso	1. Verificar el estado del empaque (que no presente dobleces o rupturas del empaque) 2. Realice la apertura y retire el dispositivo del empaque 3. Verifique que el insumo se encuentre en buenas condiciones sin dobleces 4. Realice una irrigación con agua potable o agua estéril conectando una jeringa al puerto luer lock que se		

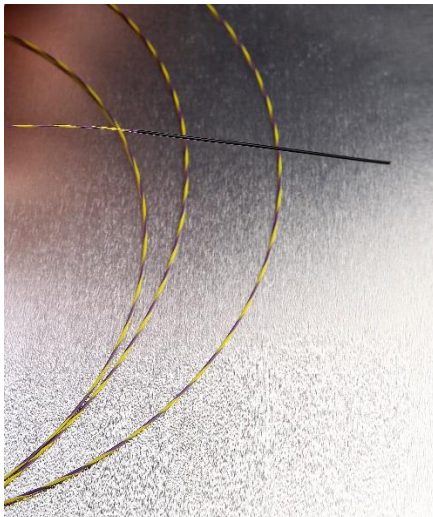

	encuentre en el extremo distal de la camisa de la guía para una correcta lubricación. 5. Inserte la parte proximal del al guía en puerto del insumo que indique GUÍA 6. Avance en tramos cortos para evitar dobleces de la guía 7. Para intercambios de dispositivos (realice el avance de la guía en tramos cortos mientras realiza el retiro del dispositivo 8. Para pasar otro dispositivo sobre la guía, inserte la punta del dispositivo por la parte distal de la guía realice el avance hasta que salga por el puerto que indica GUÍA y avance el dispositivo hasta el borde del duodenoscopio. 9. Deseche el dispositivo después de su uso de acuerdo a su control institucional
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna

