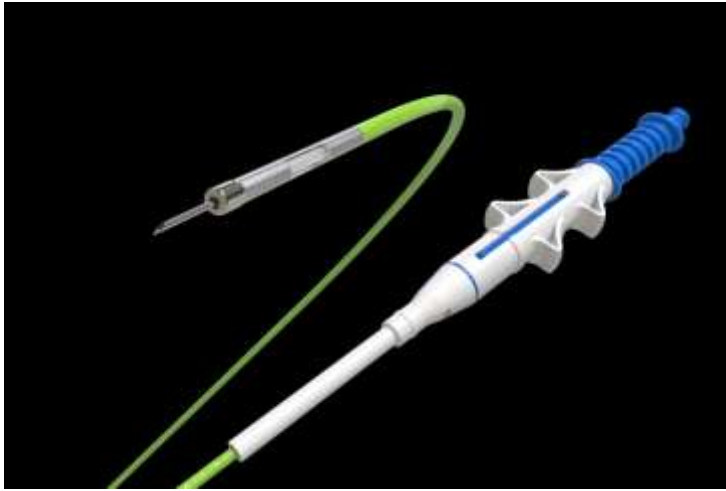


FICHA TÉCNICA. AGUJA O INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA PARA GASTROENTEROLOGÍA		Código – Referencia	
		AG-5081-2423-2106	
		Edición	1
		Fecha	2021-08-18
Imagen			
Nombre	Aguja o Inyector para Escleroterapia		
Marca	AGS MEDTECH		
País de Fabricación	China		
Registro INVIMA	2021DM-0024092		
Descripción	Dispositivo usado para inyectar la con medicamento o sustancia esclerosante que permita realizar vasoconstricción al tejido de la mucosa endoscópica y detener sangrados o hemorragias.		
Materiales de Composición	Policarbonato, Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Acero inoxidable, Gel de Silica		
Características	AG-5081-2423-2106 , Longitud de trabajo 2300 mm, Diámetro externo 2,4 mm, Gauge de la aguja: 21; Longitud de la aguja: 6 mm; Tipo de mango: Con sistema de seguridad; Funda de material: Policarbonato		
Presentación	Empaque estéril sellado		
Tipo de Dispositivo	Descartable	☒ X	Reusable
			Clasificación
			Ila
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.		
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Caja por 10 unidades.		
Instrucciones de Uso	1. Después visualizar endoscópicamente el área de inyección para proceder a realizar la vasoconstricción, seleccione la aguja compatible con el endoscopio que está siendo utilizado. 2. Coloque el inyector con la aguja con el medicamento en el área conexión gire la jeringa fijándola, inyecte el medicamento		

	a través de la aguja para purgarla evitando la inyección de aire. 3. Avance en pequeños tramos, hasta que el dispositivo se visualice saliendo por el extremo distal del endoscopio. Nota: si experimento resistencia mientras se avanza la aguja, enderece punta del endoscopio ligeramente. NO ejerza excesiva presión sobre el accesorio a través del Endoscopio. Si el endoscopio tiene un accesorio elevador, deje el elevador en la posición abierto para permitir el paso de la aguja. Luego utilice el elevador para posicionar. 4. Teniendo visualmente el área de inyección, gire el puerto externo de la aguja y empuje el mango realizando la salida de la aguja, empuje el accesorio al área e inyecte según requerimiento del especialista. 5. Al terminar el proceso de inyección gire el puerto externo de la aguja y hale el mango para ingresar la aguja a la funda plástica de la misma y asegúrela para evitar la salida de la misma en el canal de trabajo. 6. Manténgala fija retire la aguja en tramos cortos sin halar con fuerza para evitar el daño del canal de trabajo. 7. Limpie el exceso de secreciones de accesorio. 8. Deseche el dispositivo después de su uso de acuerdo a su control institucional. Se sugiere que la aguja de la punta sea desechada en un guardián para su respectiva disposición final.
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna