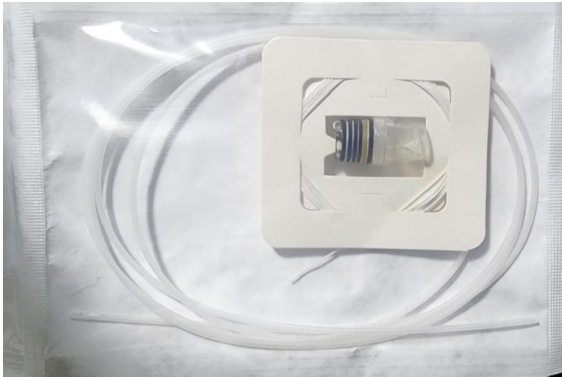


FICHA TÉCNICA. BARRIL RECAMBIO PARA LIGADOR DE VARICES COLONICAS		Código – Referencia	
		SBL-6-C	
		Edición	1
		Fecha	2021-08-18
Imagen			
Nombre	BARRIL MULTIBANDA VARICES COLONICAS		
Marca	SHAILI ENDOSCOPY		
País de Fabricación	INDIA		
Registro INVIMA	2014DM-0011745		
Descripción	Dispositivo usado para ocluir varices generando vasoconstricción aplicable para esófago		
Materiales de Composición	NAILON, PTFE		
Características	SBL-6-C , Diametro de endoscopio requerido: 12,8 a 13,5 mm,		
Presentación	Empaque estéril sellado		
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable
			Clasificación
			Ila
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.		
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Kit que incluye aplicador, barril con 6 bandas		
Instrucciones de Uso	1. Seleccione barril según el procedimiento endoscópico, realice el montaje del dispositivo colocando el mango en el puerto de biopsia a través del tapón de biopsia para evitar la pérdida de aire. 2. Pase a través del mango la guía y a su vez por el canal de trabajo para capturar el hilo en la punta distal del endoscopio. (Verifique la posición del barril con las bandas hacia la parte distal del endoscopio) 3. Tome el hilo el cual tiene un nudo al extremo distal pase el hilo a través de la guía y deje este a una distancia de 5mm		

	para que sea fácil el paso por el canal de trabajo, hale lentamente la guía hacia afuera del equipo por el puerto de biopsia hasta que el hilo salga a través del mango. Libere la guía y está ya se puede desechar según protocolos de la entidad. - El barril queda cercano a la punta distal instálelo sin los hilos cruzados para evitar que la banda ligadura se pierda y obtener mayor visibilidad. Ejercer suave presión del barril hacia la punta distal del endoscopio asegurándose que quede fija. - Hale el hilo y páselo a través del centro de la perilla del mango ajuste el nudo haciendo presión hacia abajo de este vici para que quede asegurado, ejerza presión hacia el lado izquierdo de la perilla y gírela hacia adelante tensionando el hilo suavemente e iniciar así el procedimiento (NO ejerce mucha presión liberara las bandas antes de tiempo). - Realice el procedimiento endoscopio ubicando la punta del endoscopio a la varice, realice succión sobre esta hasta que la varice ingrese totalmente al cap del barril sin soltar la succión gire la perilla hacia delante para liberar la banda (al realizar este proceso el especialista identifica cuando libera la banda). Suelte la succión y aleje el equipo de la varice allí visualizara la varice ligada, el barril tiene una capacidad de seis bandas la penúltima tiene un color diferente como indicador visual. - En caso de no uso de las bandas y desear recuperar; ejerza presión a la derecha para liberar el hilo y no perder bandas. - Deseche el dispositivo después de su uso de acuerdo a su control institucional
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna