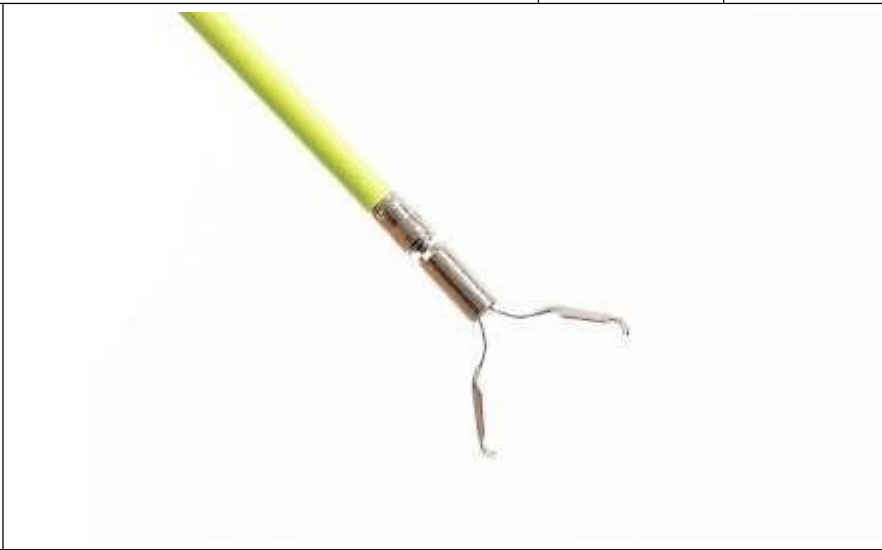


FICHA TÉCNICA. CLIP HEMOSTATICO DE APERTURA 16 MM		Código – Referencia	
		AG-51044-2300-090-16	
		Edición	1
		Fecha	2021-08-18
Imagen			
Nombre	Clip hemostático		
Marca	AGS MEDTECH		
País de Fabricación	China		
Registro INVIMA	2022DM-0025905		
Descripción	Dispositivo diseñado para realizar hemostasia mecánica en el tracto gastrointestinal, provocada por perforaciones o sangrados		
Materiales de Composición	Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Cobre, Politetrafluoroetileno, Acero Inoxidable		
Características	AG-51044-2300-090-16 , Longitud de trabajo 2300 mm, Canal de trabajo mínimo requerido: 2.6 mm, Apertura del clip 16 mm; ángulo de la pestaña del Clip: 90°; Reposicionable, rotatable, No recubierto.		
Presentación	Empaque estéril sellado		
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable
			Clasificación
			IIb
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.		
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Caja por 10 unidades.		

[Escriba aquí]

Instrucciones de Uso	1. Verificar el estado del empaque (que no presente dobleces o rupturas del empaque) 2. Realizar la remoción del protector del clip, para permitir la apertura y cierre del mismo ante de ingresarlo por el canal de trabajo 3. Sujete firmemente el mando del aplicador del clip para mantener cerrado el miso cuando se efectúe la inserción por el canal de trabajo, una vez se encuentre posicionado el endoscopio sobre la zona de colocación 4. Una vez sobresalga el Clip por la punta del endoscopio realice el posicionamiento del mismo sobre la lesión permieniendole abrirlo o cerrarlo múltiples veces, o rotarle de acuerdo con la necesidad 5. Para efectuar la colocación del clip, efectúe la retracción del émbolo del mismo hasta la total liberación. 6. Retire el cuerpo aplicador y deséchelo
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna

[Escriba aquí]