


Imagen

FICHA TÉCNICA. ESFINTERÓTOMO DE ARCO

Código – Referencia

AG-5096-0525

Edición 1

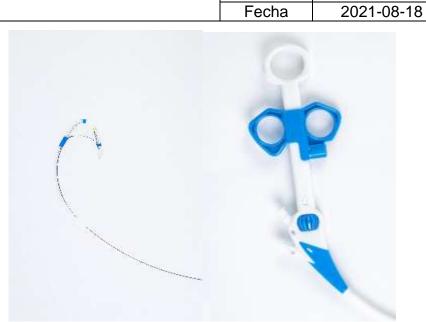

Nombre	Esfinterótomo de arco para papilotomia
Marca	AGS MEDTECH
País de Fabricación	China
Registro INVIMA	2021DM-0024100
Descripción	Dispositivo utilizado para acceder a la vía biliar cuando la papila de Vater se encuentra obstruida, la punta permite canular la papila para a continuación con la sección de corte realizar la incisión sobre la zona para poder ingresar otros dispositivos, realizar otros cortes e inyectar el medio de contraste.
Materiales de	Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato, Cobre,
Composición	Politetrafluoroetileno, Acero Inoxidable, Nitinol.
Características	AG-5096-0525, Longitud de trabajo 1800 mm, Diámetro de canal de trabajo requerido 2,8 mm ó superior, Diámetro externo de la punta 1,6 mm; Longitud de la punta: 0.5 mm, Longitud de la sección de corte 25 mm; Revestimiento de la sección de corte: SI; Lúmenes: 3
Presentación	Empaque estéril sellado
Tipo de Dispositivo	Descartable X Reusable Clasificación IIa
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un ligar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Caja por 5 unidades.
Instrucciones de Uso	1. Una vez se haya efectuado abordaje con el duodenoscopio hasta encontrarse posicionado en la zona de la papila de Vater y se encuentra la obstrucción de la misma.



	2. Se procede a efectuar el paso del esfinterótomo de arco a través de canal de trabajo del duodenoscopio.
	3. Se realiza inserción de la punta del esfinterotomo en la papila
	4. Se realiza accionamiento del mango para realizar la papilotomia y permitir el ingreso del esfinterótomo con el que se inyectará medio de contraste a la vía biliar.
	5. El esfinterótomo de arco permite el paso adicional de accesorios como guías para realizar la canulacion de la via biliar.
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna



Medellín- Antioquia —Colombia Transversal 39 b No. 39 — 159 Oficina 507 Teléfonos: + 57 4 -5806644 — 317 370 64 25 Mail: direccionmedellin@biosimtec.com.co

Sede principal: Bogotá D.C. —Colombia Carrera 80C No 25-36— Barrio Modelia Teléfonos: + 57 1 3099308 — 3003645 Mail: ventas@biosimtec.com.co