

FICHA TÉCNICA. PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE PARA ENDOSCOPIO RECUBIERTA		Código – Referencia	
		AG-5019-2316	
		Edición	1
		Fecha	2021-08-18
Imagen			
Nombre	Pinza de biopsia desechable para endoscopio recubierta		
Marca	AGS MEDTECH		
País de Fabricación	China		
Registro INVIMA	2021DM-0024092		
Descripción	Dispositivo diseñado para proporcionar una herramienta que permita al médico especialista realizar toma de muestras de tejido o mucosa..		
Materiales de Composición	Acrilonitrilo Butadieno Estireno Grado Médico, Polietileno,		
Características	AG-5019-2316 , Longitud de trabajo 1600 mm, Diámetro de la copa: 2.3 mm apertura de la copa: 6.5 mm Volumen de muestra: 5.9 mm ³ , Canal de trabajo mínimo requerido: 2,8 mm, Tipo de copa: Oval lisa, Tiene estilete: NO, Recubierta: SI		
Presentación	Empaque estéril sellado		
Tipo de Dispositivo	Descartable	☒ X	Reusable ☐
			Clasificación
			Ila
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.		
Presentación	Individual. Unidad de empaque: Caja por 10 unidades.		
Instrucciones de Uso	1.Después visualizar endoscópicamente el área objeto de toma de biopsia seleccione la pinza de biopsia compatible con el endoscopio que está siendo utilizado. 2.Con las mandíbulas cerradas, introduzca la pinza de biopsia en el canal de biopsias del endoscopio.		



	3. Avance en pequeños tramos, hasta que el dispositivo se visualice saliendo por el extremo distal del endoscopio. Nota: si experimento resistencia mientras se avanza la pinza de biopsia, enderece punta del endoscopio ligeramente. NO ejerza excesiva presión sobre el accesorio a través del Endoscopio. Si el endoscopio tiene un accesorio elevador, deje el elevador en la posición abierto para permitir el paso de la pinza de biopsia. Luego utilice el elevador para posicionar. 4. Después de avanzar la pinza para tomar la biopsia deseada o al sitio de recuperación del cuerpo extraño, abra la pinza y empuje el dispositivo hacia el tejido para hacer una biopsia o al objeto que se debe recuperar. 5. Realice una ligera presión, para cerrar la pinza alrededor del tejido o cuerpo extraño. Mantenga una presión suave en la manija para mantener cerradas las Mandíbulas de la pinza mientras retira suavemente la pinza del sitio. NOTA: no es necesario aplicar una presión excesiva para extirpar tejido limpiamente. 6. Continúe aplicando una ligera presión en el mango mientras se extrae la pinza de biopsias del canal. Si se esta recuperando un cuerpo extraño, retirar suavemente el objeto con la pinza hasta llegar a la punta del endoscopio, seguidamente retire el endoscopio suavemente monitoreando el cuerpo extraño 7. Limpie el exceso de secreciones del cable 8. Deseche el dispositivo después de su uso de acuerdo a su control institucional
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna

