

FICHA TÉCNICA. KIT PARA GASTROSTOMIA POR PRIMERA VEZ		Código – Referencia	
		S-PEG-20-SN-SC	
		Edición	1
		Fecha	2021-12-13
Imagen			
Nombre	Kit para gastrostomía por primera vez		
Marca	SHAILI ENDOSCOPY		
País de Fabricación	INDIA		
Registro INVIMA	2014DM-0011745		
Descripción	Se utiliza para la colocación de gastrostomía endoscópica percutánea, para proporcionar nutrición externa al paciente que requiere apoyo nutricional		
Materiales de Composición	Acero inoxidable, silicona,		
Características	S-PEG-20-SN-SC		
Presentación	Empaque estéril sellado. 1. tubo de alimentación de silicona 20 Fr. 1. alambre de inserción de bucle 1. sujeta cables 1. adaptador recto. 1. Adaptador. 1. casquillo de silicona para bloqueo. 1. Aguja introductora. 1. bisturí #11 1. 5 ml. Jeringa con aguja. 1. Aguja de calibre 25. 1 tijera. 1 manual de instrucciones.		
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso		



	de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.
Presentación	Individual. Unidad de empaque
Instrucciones de Uso	1. Alternativamente, los tubos de gastrostomía pueden colocarse con la ayuda de un endoscopio, haciendo una incisión mucho más pequeña (colocación de tubos de gastrostomía por endoscopia percutánea o PEG, por sus siglas en inglés). La colocación de una sonda por endoscopia percutánea se puede hacer con anestesia local en vez de anestesia general. Se pasa un endoscopio por la boca, se baja por el esófago y se introduce en el estómago. Luego, el cirujano puede ver la pared estomacal a través de la cual pasará la sonda gástrica percutánea. Bajo observación directa con el endoscopio, se pasa la sonda gástrica a través de la piel del abdomen por una incisión muy pequeña y se introduce en el estómago. Después, se infla el balón en el extremo de la sonda para mantenerla en posición. Las sondas gástricas percutáneas evitan el uso de anestesia general y la realización de una incisión grande.
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna

