



Doc. Ref.: PSD0015		N.º: EISO-XXH2		NORMA ISO80369-3	
as ISOSAF		Aplicación:		Enteral	
Especificaciones técnicas					
Materias primas: Cuerpo: poliprop		pileno		Émbolo: polipropileno	
Junta: goma polis		soprénica		Lubricante: aceite de silicona	
Blíster individual estéril (PP/PE)					
Clase IIa (100 ml)					
Vida útil de 5 años, Duracion 7 dias No contiene ftalatos, látex ni DEHP					
	nicas Cuerpo: poliprop Junta: goma poli Blíster individual Clase Ila (100 m	nicas Cuerpo: polipropileno Junta: goma polisoprénica Blíster individual estéril (PP/PE) Clase IIa (100 ml) Vida útil de 5 años, Duracion 7	Aplicación: nicas Cuerpo: polipropileno Junta: goma polisoprénica Blíster individual estéril (PP/PE) Clase IIa (100 ml) Vida útil de 5 años, Duracion 7 dias	Aplicación: nicas Cuerpo: polipropileno Émbolo: po Junta: goma polisoprénica Lubricante Blíster individual estéril (PP/PE) Clase Ila (100 ml) Vida útil de 5 años, Duracion 7 dias	

Indicaciones de uso:

Las jeringas enterales/orales están indicadas para administrar medicación líquida y preparados para la alimentación/nutrición enteral en el tubo digestivo por vía oral o mediante sonda de alimentación

Recomendaciones de uso:

- 1. Lavar el cuerpo y el émbolo a mano con agua tibia y jabón.
- 2. Enjuagar ambas piezas con agua fría del grifo y dejar secar al aire.
- 3. Guardar en un contenedor limpio y seco con tapa.
- 4. Desechar la jeringa si hay alguna pieza dañada, la graduación del cuerpo no está clara

