

Ficha Técnica

Guantes Estériles



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guantes Quirúrgicos de Látex Estériles.
Marca:	M&H Care.
Material:	Los guantes quirúrgicos de látex estériles de M&H CARE son fabricados a partir de látex de caucho natural sometidos a procesos de inmersión, pulverización y curación. Para los que tienen polvo contienen además talco a base de Almidón de Maíz grado USP.
Color:	Blanco, transparente y azul.
Referencias	XS, S, M, L, XL.
Presentación:	Caja interna x 100 unidades, caja máster x 1000 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los Guantes Quirúrgicos de Látex Estériles M&H CARE pueden ser utilizados en procedimientos quirúrgicos y asepticos, para evitar el contacto con las secreciones corporales y prevenir la contaminación cruzada entre pacientes, personal médico y el material médico utilizado.
Estéril:	Si. Óxido de Etileno.
Tamaños:	Ver propiedades físicas.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Cartón.
Clasificación de Riesgo:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Libre de Pirógenos:	Si: ☒ No: ☐	Seguro y Confortable:	Si: ☒ No: ☐
Flexibilidad:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐ No Tóxico: Si: ☒ No: ☐

PROPIEDADES FÍSICAS

Longitud (mm):	Todas las Tallas (≥ 265 mm).
Grosor (mm):	Todas las Tallas (≥ 0.1 mm).
Ancho (mm):	(6: 77mm $\pm$ 5), (6.5: 83mm $\pm$ 5) (7: 89mm $\pm$ 5), (7.5: 95mm $\pm$ 5) (8: 102mm $\pm$ 5), (8.5: 108mm $\pm$ 5)

Instrucciones de Uso:

1. Lave las manos según la técnica establecida.
2. Abra el empaque de los guantes como se indica en el envoltorio.
3. Separe las láminas del papel de envoltura sin tocar los guantes.
4. Con su mano dominante tome el guante de la mano contraria por el borde del doblez.
5. Coloque la mano no dominante hacia arriba en forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma de la mano, coloque el guante sin terminar de estirarlo.
6. Para colocar el segundo guante introduzca los dedos de la mano vestida dentro del bolsillo exterior que forma el doblez.
7. Coloque la mano dominante hacia arriba en forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma de la mano, coloque el guante y hale hasta ajustar.
8. Termine de ajustar el primer guante.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH1017	Guante Estéril 6, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1003	Guante Estéril 6 1/2, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1004	Guante Estéril 7, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1005	Guante Estéril 7 1/2, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1006	Guante Estéril 8, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1007	Guante Estéril 8 1/2, con Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1018	Guante Estéril 6, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1011X	Guante Estéril 6 1/2, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1012	Guante Estéril 7, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1013	Guante Estéril 7 1/2, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1014	Guante Estéril 8, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591
MH1015	Guante Estéril 8 1/2, sin Talco, caja máster x 500 pares.	2015 DM - 0013591

PROPIEDADES MECÁNICAS

ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	Resistencia a la Ruptura: 750% Mínimo.	Elongación Máxima: 24 Mpa Mínimo.
DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO	Resistencia a la Ruptura: 560% Mínimo.	Elongación Máxima: 18 Mpa Mínimo.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.

CONTÁCTENOS

Email:
info@norstraynuart.com
Teléfono: +57 (1) 295 66 16

IMPORTADO POR

Norstray Nuart S.A.S.
Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,
Galapa, Colombia.
www.norstraynuart.com