

Ficha Técnica

Equipo para Administración de Soluciones



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Equipo para Administración de Soluciones. / Infusion Sets for Single Use.
Marca:	M&H Care.
Material:	El Equipo para Administración de Soluciones de M&H Care está fabricado en LDPE (polietileno de baja densidad), PVC (policloruro de vinilo), PP (polipropileno), ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
Presentación:	Bolsa x 1 unidad. Bolsa interna x 25 unidades. Caja máster x 300 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El Equipo para Administración de Soluciones de M&H Care, es usado en la administración de soluciones por vía parenteral e intravenosa.
Estéril:	Si. Óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Plástico.
Condiciones Especiales:	Usar técnica aséptica.
Clasificación de Riesgo:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Libre de Pirógenos:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐	No Tóxico:	Si: ☒ No: ☐
----------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--

PROPIEDADES FÍSICAS

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA	INSTRUCCIONES DE USO
Tapa Protectora	LDPE (Polietileno de baja densidad)	Prepare la bolsa, frasco o contenedor de la solución a administrar
Punta Ventilada	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	Cierre la llave de paso del equipo
Cámara de Goteo	PVC (Policloruro de Vinilo)	Retire el protector del conector
Filtro de Fluido	PVC (Policloruro de Vinilo)	Bombee la cámara de goteo hasta llenarla al nivel requerido
Regulador de Flujo	PP (Polipropileno)	Llene el equipo y elimine las burbujas de aire
Puerto de Inyección	Libre de Látex	Asegúrese que la aguja este bien conectada
Conector Luer Lock	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	Abra la llave de paso del equipo y regule el flujo con el dispositivo de regulación
Protector Luer Lock	LDPE (Polietileno de baja densidad)	
Tubo	PVC (Policloruro de Vinilo)	No permita que quede aire atrapado en el equipo

PRECAUCIONES

No usar si el paquete está dañado o abierto	No reutilizar	Protéjase de la luz y el calor
Almacénese en un lugar fresco y seco	Estéril si el empaque permanece sellado	

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH4075	Equipo para Administración de Soluciones, Macrogoteo, Sin Aguja, caja máster x 300 unidades.	2023DM-0026967
MH4076	Equipo para Administración de Soluciones, Microgoteo, Sin Aguja, caja máster x 300 unidades.	2023DM-0026967

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.

CONTÁCTENOS

Email:
info@norstraynuart.com
www.norstraynuart.com

IMPORTADO POR

Norstray Nuart S.A.S.
Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol,
Bogotá, Colombia.
Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,
Galapa, Colombia.