

Producto Libre de Látex y
Ftalatos

ASPIRADOR

AMEU[®]



Aspirador Ameu es una Marca registrada de Dolphin Medical S.P.A





Dolphin Medical

www.dolphinmedical.com

¿QUÉ ES **AMEU**?

La aspiración manual endouterina es un procedimiento médico simple, eficaz y seguro para la evacuación uterina en el tratamiento de un **aborto incompleto y para la biopsia endometrial**.

El ASPIRADOR AMEU es un catéter especialmente desarrollado para el método de aspiración manual endouterina (**AMEU**) y biopsia de endometrio.

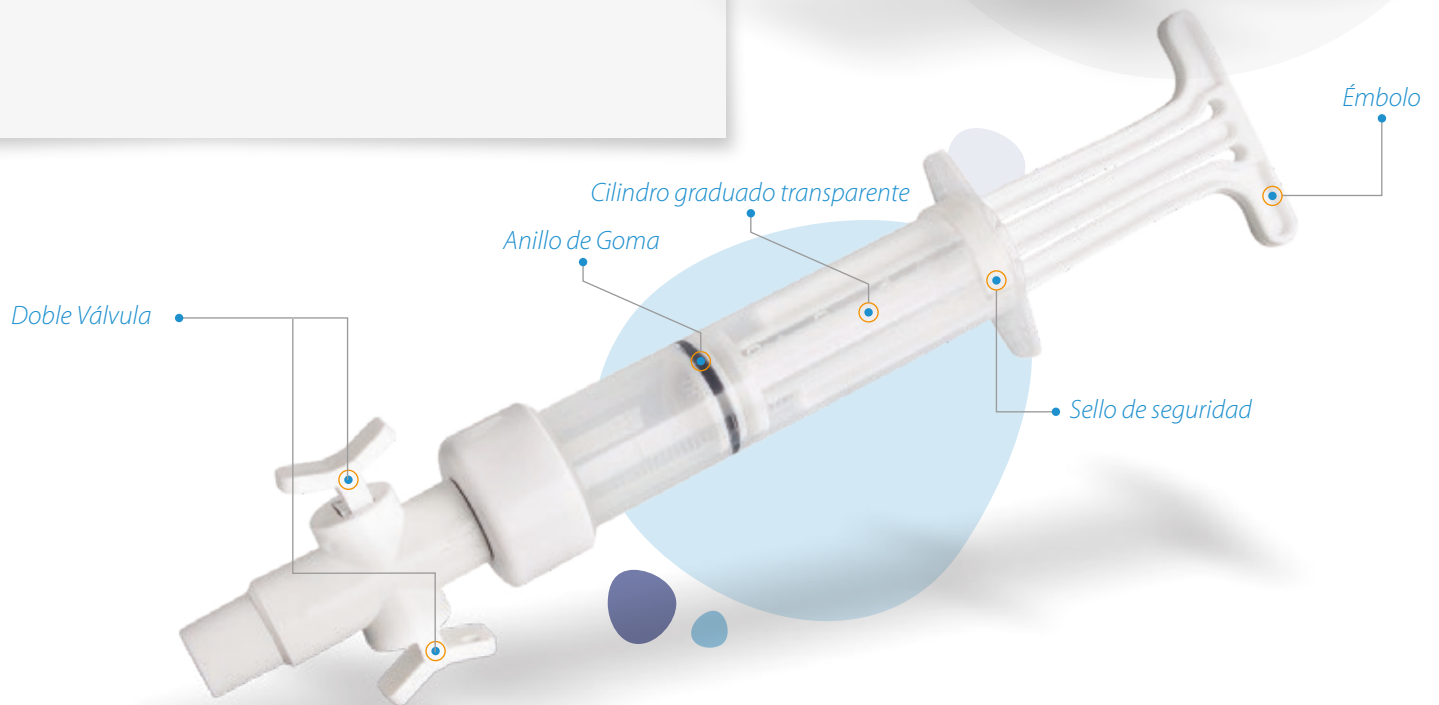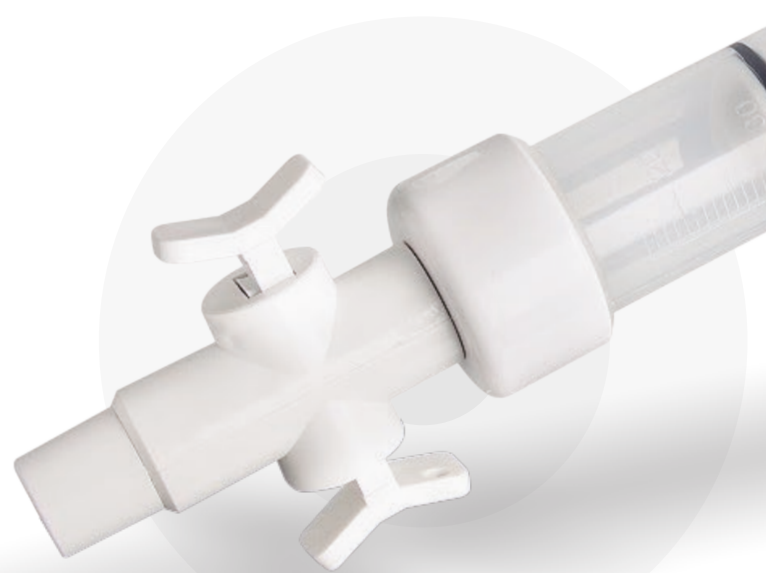

¿CÓMO FUNCIONA?

Funciona mediante un sencillo mecanismo de aspiración, el cual tiene alta potencia debido al diseño del conjunto cuerpo-pistón, 60cc, mediante cánulas flexibles o semirrígidas de diferentes diámetros (de 4mm a 12mm).

INDICACIÓN DE USO

Está indicado para la evacuación uterina, aspiración uterina en obstetricia y procedimientos ginecológicos.


USOS

- Legrado por succión.
- Succionar la cavidad uterina.
- Obtención de biopsias de endometrio.
- Tratamiento de hemorragias uterinas anormales.
- Tratamiento del aborto incompleto.
- Tratamiento del aborto espontáneo.
- Tratamiento de un aborto con medicamentos fallido.
- Tratamiento de un aborto espontáneo perdido.
- Interrupción de un embarazo molar.
- Tratamiento de la endometritis crónica.

CARACTERÍSTICAS

- Presentado en embalaje individual de papel de grado quirúrgico.vv
- Volumen: 60 ml
- Vacío: 609.6-660.4mm / Hg
- **Libre de látex y ftalatos**
- Individualmente envasados y esterilizados en OE
- Se adapta perfectamente a los catéter flexibles de 4 hasta 12mm.

Estudios científicos demuestran la superioridad sobre el curetaje instrumental, con menores riesgos de perforación y lesiones, además de disminuir el empleo de medicamentos, reduciendo también la permanencia hospitalaria.

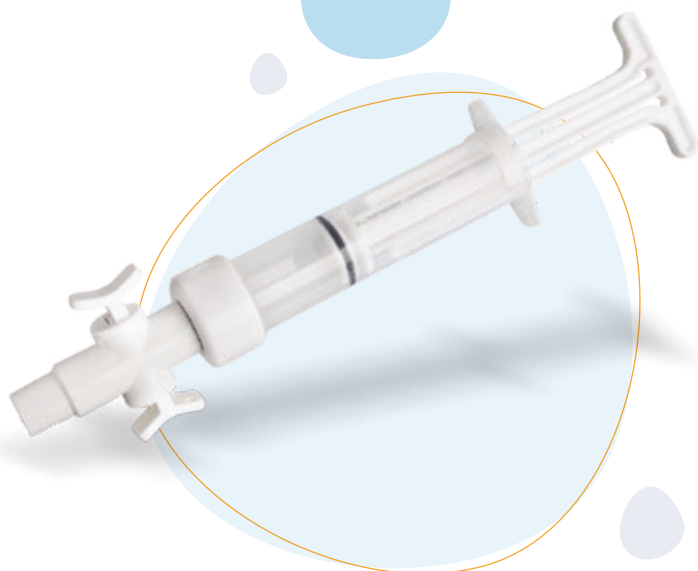

Código	Descripción Producto	Presentación
209 05	Jeringa Aspirador Ameu	Unitario
208 04	Cánula Flexible 4mm	Unitario
208 05	Cánula Flexible 5mm	Unitario
208 06	Cánula Flexible 6mm	Unitario
208 07	Cánula Flexible 7mm	Unitario
208 08	Cánula Flexible 8mm	Unitario
208 09	Cánula Flexible 9mm	Unitario
208 10	Cánula Flexible 10mm	Unitario
208 12	Cánula Flexible 12mm	Unitario
209 04 12	Kit Aspirador Ameu	Unitario



Producto libre de
Látex de caucho natural



Producto libre de Ftalatos



ADAPTADORES

- Adaptador azul: Cánulas tamaño 3-4-5-6.
- Adaptador café claro: Cánula tamaño 7.
- Adaptador blanco: Cánula tamaño 8.
- Adaptador café oscuro: Cánula tamaño 9.
- Adaptador verde: Cánula tamaño 10.
- La cánula tamaño 12 se ajusta directamente al Aspirador AMEU.



CÁNULAS

- La longitud total es de 22 cm.
- Superficie lisa del catéter.
- Punta redondeada.
- Empaquetado individualmente en envase bilaminado de fácil apertura.
- Opciones de diámetro de 3-12 mm.
- Códigos de colores coincidentes para el adaptador para facilitar el emparejamiento (cuando sea necesario).

ACCESORIOS

- Tuvo de silicona o lubricante para anillo de goma
- Anillo de goma
- Sello de seguridad





Dolphin Medical

BOLIVIA

- 📍 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- ☎️ (591-3) 342 2120
- ✉️ ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

- 📍 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- ☎️ (56 2) 2952 0165
- ✉️ ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

- 📍 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- ☎️ (57 1) 31 3412 3620
- ✉️ ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

- 📍 Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú
- ☎️ (51) 9 4027 5805
- ✉️ ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

BALÓN

POST PARTO




Dolphin Medical

www.dolphinmedical.com

¿QUÉ ES?

Es un catéter desechable de múltiples lúmenes conectado a un sistema de globo inflable con forma de pera diseñado para proporcionar un mejor taponamiento para controlar la hemorragia del útero y la vagina.

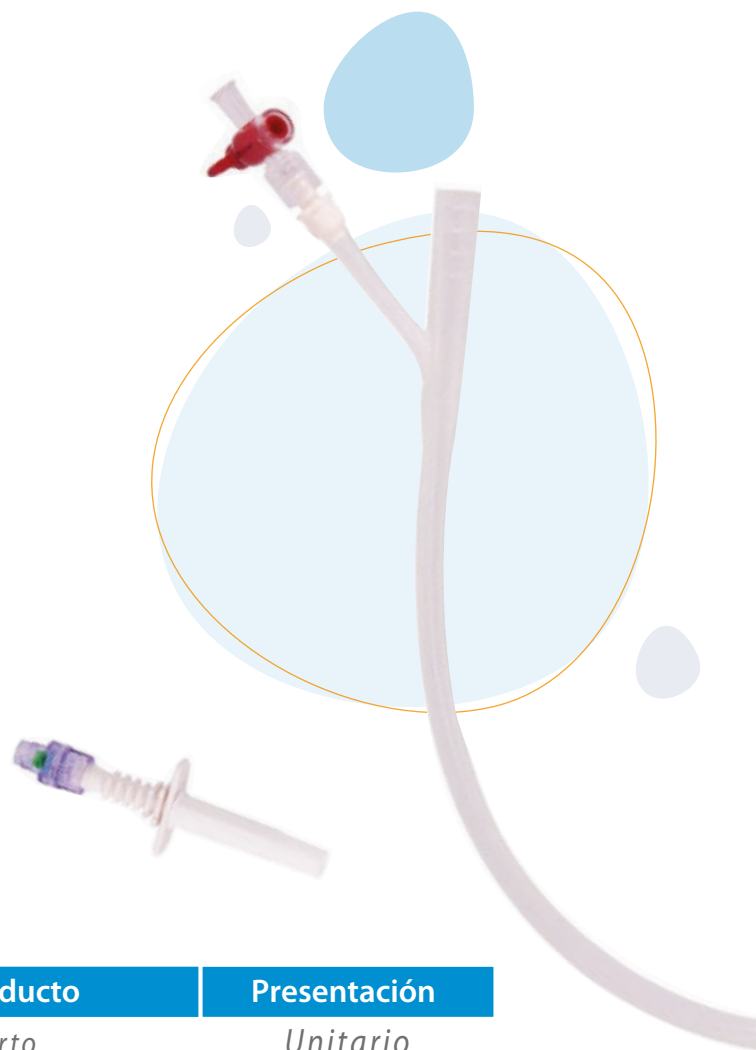

Código	Descripción Producto	Presentación
05TD0206	Balón Postparto	Unitario



CARACTERÍSTICAS

- El material 100% de silicona permite la comodidad del paciente.
- El diseño del globo en forma de pera se adapta perfectamente al útero (anatomía y forma).
- Globo súper duradero.
- No requiere ninguna operación quirúrgica para su extracción.
- El catéter de doble lumen permite inflar el globo y monitorear hemorragia.
- Dos jeringas para inflar el globo rápidamente.
- Bag Spike está equipado con válvula de retención.
- Llave de paso de tres vías para un inflado fácil, seguro y rápido.
- El globo puede ingerir hasta 4.000ml de agua salina.
- Superior a otros productos disponibles en el mercado.
- Producto estéril en Oxido de Etileno (OE)

VENTAJAS

- Más compatible con el útero al tener **forma de pera**, el globo inflado está encerrado en el útero y prensa homogéneamente toda la superficie interna del útero.
- 4L de capacidad sin daño, mientras que otros balones solo puede contener 2L.
- El balón no tiene protuberancias en el extremo distal que pueda dañar el útero.
- Como el canal de recogida de sangre es hacia adentro, permite fácilmente el paso de sangre. El canal de recaudación de otros balones pueden obstruirse fácilmente porque tienen un canal largo con pequeños agujeros.
- El Balón Post parto se bloque cuando este es llenado a su máxima capacidad debido a su forma de útero. Otros balones no cuentan con esta característica de bloqueo.

MEDIDAS

Diámetro Catéter: 24Fr
Largo Catéter: 587mm
Volumen Inflado Balón: <500ml





Dolphin Medical

BOLIVIA

- 📍 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- ☎️ (591-3) 342 2120
- ✉️ ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

- 📍 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- ☎️ (56 2) 2952 0165
- ✉️ ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

- 📍 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- ☎️ (57 1) 31 3412 3620
- ✉️ ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

- 📍 Jirón Diana Mz D2, lote 25, piso 1y2,
Int-4, urbanización Santa María de Surco,
Santiago de Surco, Lima, Perú
- ☎️ (51) 9 3480 1987
- ✉️ ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

DERMA-PUNCH

BISTURÍ DERMATOLÓGICO PARA BIOPSIA

PARA BIOPSIAS DERMATOLÓGICAS

DERMA-PUNCH.

Bisturí para biopsia dérmica redondo empaquetado individualmente sellado y estéril. Punta cilíndrica de acero al carbono afilada proporciona un espécimen más preciso.

Especificaciones Técnicas

- Hoja de acero inoxidable de gran nitidez sin fisuras para incisiones exactas con filo interno y externo.
- Diseño de mango ergonómico para un control superior, material de plástico rígido, mango ligero, acanalado para un mejor control
- Producto estéril, esterilizado en Oxido de etileno (OE)
- Empaque individual.
- Punta con tapa para mayor seguridad durante la manipulación y eliminación.
- Indicador de diámetro en el mango para una rápida identificación
- Mango concavo proporciona una fácil recuperación de muestras
- Presentación, 25 unidades x caja

**Punta con tapa
para mayor
seguridad durante
la manipulación y
la eliminación**

- 1mm
- 1.5mm
- 2mm
- 2.5mm
- 3mm
- 3.5mm
- 4mm
- 5mm
- 6mm
- 7mm
- 8mm





<i>Medida</i>	<i>Referencia</i>
1mm	DM0802510
1.5mm	DM0802515
2mm	DM0802520
2.5mm	DM0802525
3mm	DM0802530
3.5mm	DM0802535
4mm	DM0802540
5mm	DM0802550
6mm	DM0802560
7mm	DM0802570
8mm	DM0802580
Surtido	DM0802500
(5 de cada medida 2, 3, 4, 5 y 6mm)	

BOLIVIA



Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



(591-3) 342 2120



ventasdmb@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

CHILE



Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile



(+56) 2 2952 0165



ventas@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

COLOMBIA



Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia



(+57 1) 8052 464 - (+57 1) 317 893 8018



ventasdmc@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

DERMA-CURE

CURETA DÉRMICA DESECHABLE



DE USO DERMATOLÓGICO

DERMA-CURE

El **DERMA-CURE** es una cureta dérmica desechable que se utiliza para raspar lesiones en la piel y crecimientos como verrugas o melanomas. Este es un instrumento de un sólo extremo disponible con una punta de bucle redondo. El bucle está afilado en el interior y es contundente en el exterior, por lo que la lesión se puede eliminar pero la piel circundante no será dañada. Se dispone de una variedad de tamaños de punta para adaptarse a diferentes tamaños de lesiones 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 7.0 mm


El **DERMA-CURE** se esteriliza mediante radiación gamma a una dosis mínima de 2.5M Rad y tiene una vida útil de 5 años.



**El Loop es afilado
en el interior y
romo en el exterior**

Características.

- Acero inoxidable
- Empaque individual (Estéril Rayos Gamma)
- Vencimiento 5 años
- Incluye protector de punta
- Unidad de empaque Caja x 10 unidades

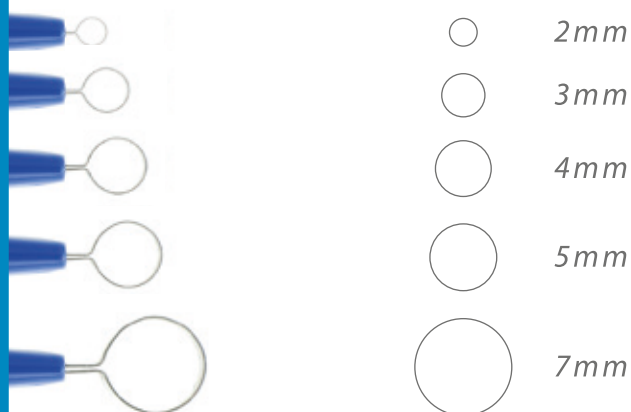

Código	Medida	Descripción	Presentación
PC2.0	2mm	DERMA-CURE	Caja x 10 unid
PC3.0	3mm	DERMA-CURE	Caja x 10 unid
PC4.0	4mm	DERMA-CURE	Caja x 10 unid
PC5.0	5mm	DERMA-CURE	Caja x 10 unid
PC7.0	7mm	DERMA-CURE	Caja x 10 unid

BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 (59 1) 3 342 2120 - (59 1) 7 213 3393
 ventasdmb@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
 (+56) 2 2952 0165
 ventas@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
 (57 1) 8052 464 - (57) 317 893 8018
 ventasdmc@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical



Dolphin Medical



CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN

La CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN esterilizada en óxido de etileno se utiliza para obtener una muestra de la mucosa uterina.

La CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN es una cánula de succión de 3 o 3,6mm (diámetro externo) esterilizada, a menos que el envoltorio esté abierto o dañado. **LA CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** ha sido diseñada para ser utilizada una sola vez.

INSTRUCCIONES

Una cánula de succión endometrial, como la **LA CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** es un dispositivo empleado para extraer muestras de materia del útero y de la mucosa uterina mediante el raspado o la succión al vacío. Estos dispositivos obtienen muestras hísticas para biopsias de detección temprana del cáncer o pueden utilizarse para extracciones menstruales.

PRECAUCIONES

No reutilizar para evitar que la usuaria pueda infectarse con algún tipo de microorganismo.

CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN

Distribuido por:



Dolphin Medical

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (56 2) 29520165
Fax: (56 2) 2249 7354
E-mail: ventas@dolphinmedical.com
www.dolphinmedical.com

CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN

Código: DME000014 - Estándar 3.0

CONTRAINDICACIONES

El procedimiento está contraindicado en casos de sospecha de embarazo o en mujeres con infecciones pélvicas agudas.

También está contraindicado para mujeres con infecciones crónicas del cuello uterino o para cualquier condición que desaconseje un procedimiento quirúrgico.

PROCEDIMIENTOS

Al sondear el útero utilizando este dispositivo, se debe tener precaución de la pared uterina. Asegúrese de no desplazar el pistón de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** cuando se encuentre dentro del útero.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparar la vagina y el cuello uterino para iniciar un procedimiento intrauterino estéril.
2. Exponer el cuello uterino con el uso de un espéculo adecuado.



0434



3. Introducir suavemente una sonda uterina para determinar la profundidad y la dirección de la cavidad uterina. Puede ser necesario sujetar el cuello del útero con un tenáculo.

Si el útero está en retroversión se debe sujetar al labio posterior del cuello uterino.

Aplicar una tracción suave para estirar cualquier posible curvatura del cuello uterino.

4. Una vez determinada la profundidad del cuello uterino, insertar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** prestando mucha atención a la escala en el relieve de la funda de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. Esta escala proporciona precaución adicional contra posibles perforaciones.

5. Con el pistón totalmente presionado, insertar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** e introducir suavemente a través del cuello uterino cualquier tracción aplicada con el tenáculo.

6. Con una mano sostener el extremo proximal de la "paleta" del pistón, retirar rápidamente el pistón tirando de la "paleta" para crear un vacío o succión con la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. El movimiento de retiro debe ser suave pero rápido y constante, hasta que el pistón llegue al tope integrado a la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. Dejar el pistón en posición totalmente retraída.

7. Una vez que el pistón se ha contraído, inmediatamente girar (dar vueltas o rodar) la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** con los dedos mientras se avanza y retrocede, al mismo tiempo debe moverse de lado a lado dentro de la cavidad uterina. Realizar este movimiento de barrido durante al menos tres o cuatro veces para obtener una muestra adecuada.

8. La **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** debe retirarse del útero con suavidad. Al examinar el dispositivo, debe observarse una pieza o muestra de la mucosa uterina. Por lo general, el sangrado resulta mínimo o no se produce.

9. Cortar la punta de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** justo por encima del punto de muestreo del dispositivo. El punto de muestreo es un pequeño agujero en el extremo distal de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**.

10. A continuación, presionar el pistón dentro de la funda y la muestra se expulsa fácilmente a un vial de transferencia apropiado.

ADVERTENCIAS

1. Por lo general, las pacientes con estenosis del cuello uterino requieren de precauciones extremas. No emplear fuerza al utilizar el dispositivo en pacientes con estenosis, es posible aplicar un anestésico tópico antes de utilizar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**.

2. Poner especial atención y observar las posibles reacciones adversas que puedan producirse ocasionalmente en cualquier procedimiento intrauterino.

REACCIONES ADVERSAS

1. Observar si las pacientes dan muestras de palidez inusual, náuseas, vértigos o debilidad. Cualquier manipulación del cuello uterino puede provocar una reacción vaso-vaginal. Estos síntomas suelen desaparecer después de unos 15 minutos de reposo o de la administración de un analgésico suave.

2. En algunos casos después del procedimiento, puede producirse hemorragias puntuales o calambres leves. Debe indicarse a la paciente que avise al médico si continúa el sangrado o si la fiebre no desaparece.



0434



ARABIN

PESARIO DE CERCLAJE

PERFORADO

Pesario de Cerclaje ARABIN "Tipo ASQ Perforado"

Indicación:


Para apoyar el cuello uterino en pacientes embarazadas, ya sea con quejas de prolapso (dolorosa "presión a la baja" al estar de pie y caminar) y mujeres embarazadas expuesta a esfuerzos físicos (por ejemplo; de pie un largo tiempo) y/o en pacientes con trabajo de parto prematuro amenazante (canalizando longitud cervical/corto).

Perforación permite el drenaje de descarga.


Medidas y Modelos

Los Pesarios de Cerclaje se clasifican de acuerdo a:

- El diámetro inferior más grande (65 o 70 mm)
- La altura (17, 21, 25, 30 mm)
- El diámetro superior pequeño (32 o 35 mm)

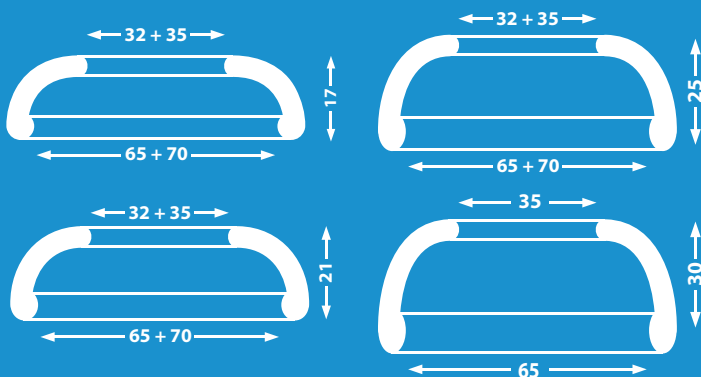

Cuando se introduce el pesario, la curva del pesario debe apuntar hacia arriba, de modo que se pueda ver la curva del orificio mas pequeño del pesario. Tal como se indica en la siguiente ilustración.

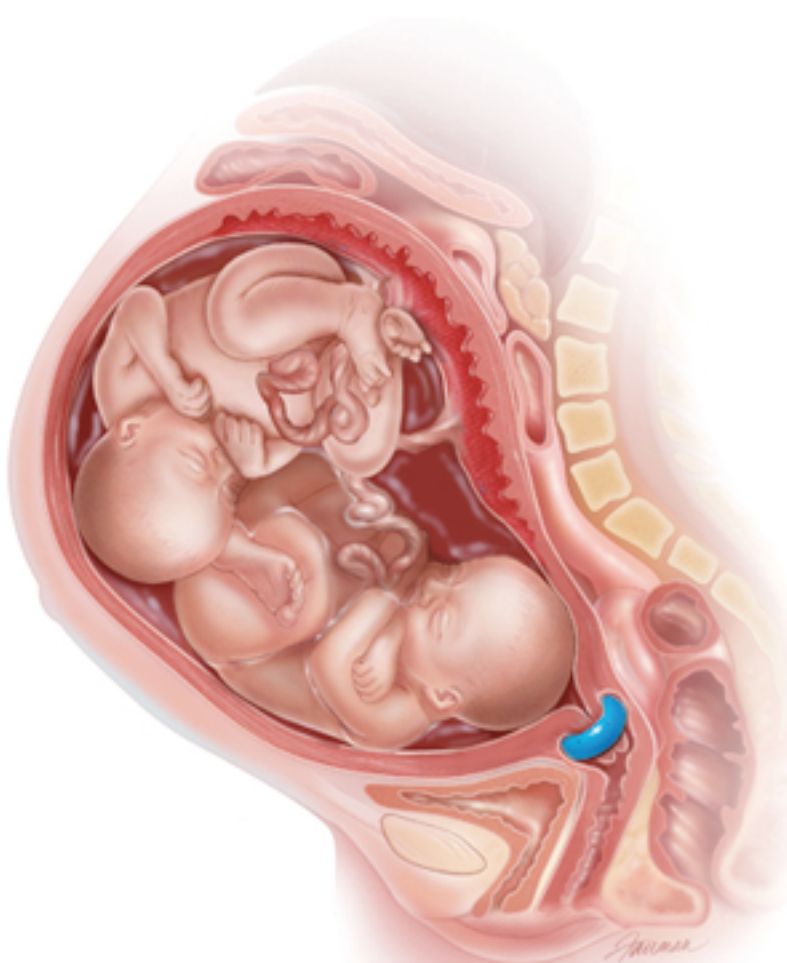




PERFORADO

Los valores normales (sonografía transvaginal) de la longitud cervical y el orificio cervical interno en la posición de decúbito o vertical.


Embarazo Simple

Embarazo Múltiple

Largo Cervical en milímetros

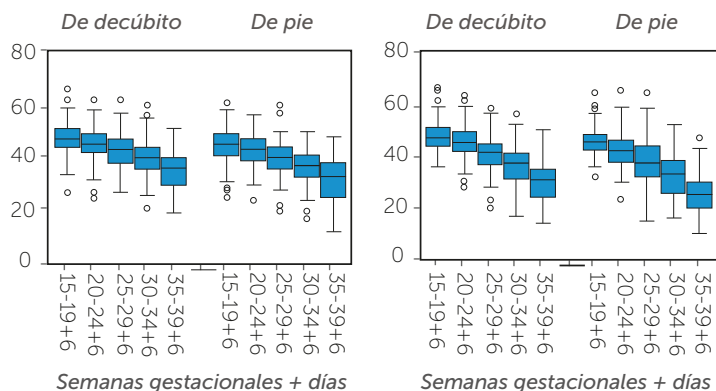


Orificio Cervical Interno (canal cervical) en milímetros

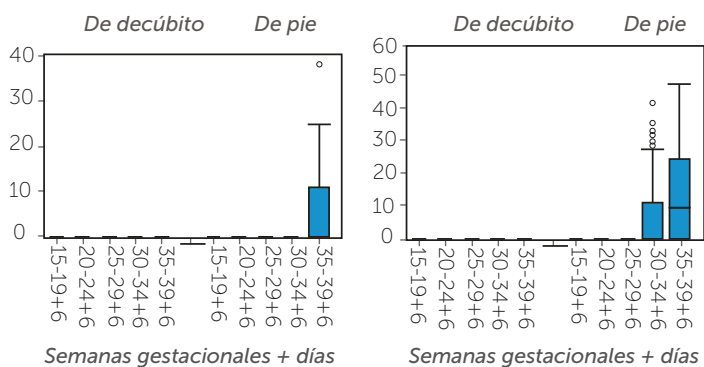

Las columnas azules representan la distribución de los valores normales entre los percentiles 25 y 75. Puede haber una indicación para colocar un pesario de cerclaje en los casos donde los valores de la longitud cervical son (muy) por debajo del percentil 25 o valores de la anchura del orificio interno son por encima del percentil 75 (principalmente antes de las 32 semanas).

Composición de la medida

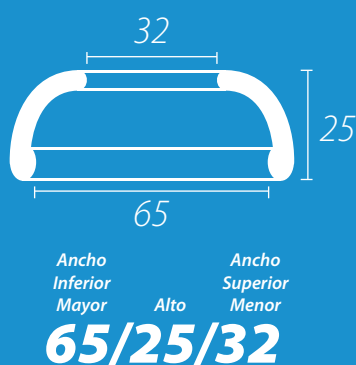

Códigos	Medida
DM65/17/32	65/17/32
DM65/17/35	65/17/35
DM65/21/32	65/21/32
DM65/21/35	65/21/35
DM65/25/32	65/25/32
DM65/25/35	65/25/35
DM65/30/35	65/30/35
DM70/17/32	70/17/32
DM70/17/35	70/17/35
DM70/21/32	70/21/32
DM70/21/35	70/21/35
DM70/25/32	70/25/32
DM70/25/35	70/25/35

BOLIVIA

Clotilde Velazco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
(591-3) 342 2120
ventasdmb@dolphinmedical.cl
www.dolphinmedical.cl

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
(+56) 2 2952 0165
ventas@dolphinmedical.cl
www.dolphinmedical.cl

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
(+57 1) 31 3412 3620
ventasdmc@dolphinmedical.cl
www.dolphinmedical.cl



Dolphin Medical

ELECTRODOS **DOLPHIN**

LLETZ - LOOP

DESCARTABLES

Electrodos Dolphin para realizar procedimientos de electrocoagulación, manejo de la patología cervical neoplásica preinvasora con la técnica de escisión con asa diatermica.

LLETZ; Large Loop Excision of the Transformation Zone
LEEP; Loop electrosurgical Excision Procedure

Indicaciones:

- Conización electroquirúrgica del cuello del útero para lesiones neoplásicas intraepiteliales (NIE)

Contraindicaciones:


- Embarazo
- Pacientes con cáncer invasor visible a la examinación

Características Técnicas:


- Alambre de tungsteno de 0,5mm
- Largo 13cm
- Conector universal, para ser usado con cualquier marca de lápiz, conexión Standard 3/32" (2,4mm)
- Para ser usado con potencia de salida de 35 a 50 Watts, dependiendo del tamaño del Asa
- Descartables

Tipos de Electroodos:


- Loop
- Rectangular
- Triangular
- Bola

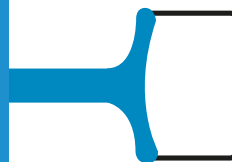

CUADRADO

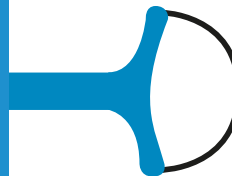

LOOP

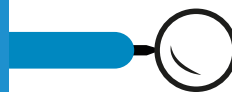

BOLA



TRIANGULAR



TIPOS DE ELECTRODOS

Electrodo Bola

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMB000003	ELECTRODO BOLA	3 mm	Caja x 10 unidades
DMB000005	ELECTRODO BOLA	5 mm	Caja x 10 unidades

Electrodo Asa Loop®

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DML000505	ELECTRODO ASA LOOP®	5 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001005	ELECTRODO ASA LOOP®	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001008	ELECTRODO ASA LOOP®	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001010	ELECTRODO ASA LOOP®	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001508	ELECTRODO ASA LOOP®	15 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001510	ELECTRODO ASA LOOP®	15 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001512	ELECTRODO ASA LOOP®	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML001515	ELECTRODO ASA LOOP®	15 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002008	ELECTRODO ASA LOOP®	20 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML002010	ELECTRODO ASA LOOP®	20 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002012	ELECTRODO ASA LOOP®	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML002015	ELECTRODO ASA LOOP®	20 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002020	ELECTRODO ASA LOOP®	20 x 20 mm	Caja x 10 unidades
DML002510	ELECTRODO ASA LOOP®	25 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002515	ELECTRODO ASA LOOP®	25 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002520	ELECTRODO ASA LOOP®	25 x 20 mm	Caja x 10 unidades

Electrodo Triangular

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMF00050	ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN SMALL	18 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DMF00100	ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN MEDIUM	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DMF00200	ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN LARGE	18 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DMF00300	ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN MEDIUM/LARGE	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades

Electrodo Rectangular

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMS001005	ELECTRODO ASA RECTANGULAR	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DMS001008	ELECTRODO ASA RECTANGULAR	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DMS001010	ELECTRODO ASA CUADRADO	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades

Lija limpiadora de puntas electroquirúrgicas

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMLQ05060	LIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRURGICA	5 x 6 cms	Caja x 50 unidades



BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
(591-3) 342 2120
ventasmb@dolphinmedical.com
www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
(56 2) 2952 0165
ventas@dolphinmedical.com
www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
(57 1) 31 3412 3620
ventasdmc@dolphinmedical.com
www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú
(51) 9 4027 5805
ventasdmp@dolphinmedical.com
www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-26112019-REV-002



Dolphin Medical

PESARIOS

PROLAPSO, INCONTINENCIA Y DIAGNÓSTICO

www.dolphinmedical.com



BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 (591-3) 342 2120
 ventasdmb@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
 (+56) 2 2952 0165
 ventas@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
 (+57 1) 31 3412 3620
 ventasdmc@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

FITTING SET

100% SILICONA QUIRÚRGICA

El Pesario "Dolphin"

Dispositivo confeccionado 100 % silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Contamos con más de 200 modelos y tamaños. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA. Son útiles para prolapso, incontinencia urinaria y diagnóstico.



SET GELLHORN / Ref:5000



SET RING / Ref: FS1000



SET RING CON MEMBRANA / Ref:FS6000

Nuestros Set de prueba, cuentan con las **seis medidas más utilizadas**, y se identifican de color **"azul"**. Permite al profesional realizar las pruebas correspondientes a cada paciente e indicar en receta, la medida seleccionada y modelo de pesario que se correlaciona con el diámetro externo de éste.



DONUT

PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El Pesario **Donut** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas.

Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



DONUT



CÓDIGO	#	CM
D2.00	#0	5.08
D2.25	#1	5.72
D2.50	#2	6.35
D2.75	#3	7.00
D3.00	#4	7.60
D3.25	#5	8.25
D3.50	#6	8.90
D3.75	#7	9.52

Silicona suave con forma de "dona". Cierra la vagina superior y apoya un prolapso uterino.

Indicaciones: Útil para cistoceles o rectoceles. Indicado para prolapso de la vagina luego de una histerectomía. Es necesaria una adecuada integración de la entrada para que el pesario se mantenga en su lugar.



CUBO

PARA PROLAPSO DE 3er GRADO

El Pesario **Cubo** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.

SIN DRENAJE



CÓDIGO	#	CM
CU25	#0	2.50
CU29	#1	2.90
CU33	#2	3.30
CU37	#3	3.70
CU41	#4	4.10
CU45	#5	4.50
CU50	#6	5.00
CU56	#7	5.60
CU63	#8	6.30
CU70	#9	7.00
CU75	#10	7.50

Silicona suave con forma de "Cubo".

Indicado para prolapso de la pared vaginal ya que evita que la pared colapse gracias a sus seis puntos de apoyo. Puede ser usado por un atleta y removido luego del ejercicio. La mucosa se moldea en las cavidades creando una presión negativa.

CON DRENAJE



CÓDIGO	#	CM
CU25D	#0	2.50
CU29D	#1	2.90
CU33D	#2	3.30
CU37D	#3	3.70
CU41D	#4	4.10
CU45D	#5	4.50
CU50D	#6	5.00
CU56D	#7	5.60
CU63D	#8	6.30
CU70D	#9	7.00
CU75D	#10	7.50

Indicaciones: Útil para prolapso de 3er grado, cistocele, rectocele con o sin tono vaginal adecuado. Frecuentemente es la única opción de apoyo satisfactoria para mujeres con un prolapso completo.



GELLHORN

VASTAGO LARGO Y CORTO

PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El Pesario **Gellhorn "Dolphin"** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas.

Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



GELLHORN



CÓDIGO	#	CM
--------	---	----

G1.50	#0	3.80
G1.75	#1	4.45
G2.00	#2	5.08
G2.25	#3	5.72
G2.50	#4	6.35
G2.75	#5	7.00
G3.00	#6	7.62
G3.25	#7	8.25
G3.50	#8	8.90

El pesario **"Gellhorn Dolphin"** con drenajes se usa para aliviar los síntomas de cistocele o rectocele. El vástago de este pesario se pliega fácilmente para facilitar la inserción y la extracción.

GELLHORN SHORT



CÓDIGO	#	CM
--------	---	----

G1.50D	#0	3.80
G1.75D	#1	4.45
G2.00D	#2	5.08
G2.25D	#3	5.72
G2.50D	#4	6.35
G2.75D	#5	7.00
G3.00D	#6	7.62
G3.25D	#7	8.25
G3.50D	#8	8.90

Indicaciones: Útil en incontinencia. Se ajusta superior y anteriormente. Entrega menos apoyo para rectoceles ya que hay menos apoyo en el segmento posterior.



RING

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1ER Y 2DO GRADO

El Pesario **Ring con y sin membrana** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



RING



Código	#	CM
R1.75	#0	4.45
R2.00	#1	5.08
R2.25	#2	5.72
R2.50	#3	6.35
R2.75	#4	7.00
R3.00	#5	7.62
R3.25	#6	8.25
R3.50	#7	8.90
R3.75	#8	9.52
R4.00	#9	10.15

Anillo redondo flexible con muesca que facilita la colocación. Ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. La membrana entrega apoyo adicional para un "CISTOCELE".

RING CON MEMBRANA



Código	#	CM
R1.75	#0	4.45
R2.00	#1	5.08
R2.25	#2	5.72
R2.50	#3	6.35
R2.75	#4	7.00
R3.00	#5	7.62
R3.25	#6	8.25
R3.50	#7	8.90
R3.75	#8	9.52
R4.00	#9	10.15

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de segundo grado, asociado con un cistocele menor.



RING CON SOPORTE

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1ER Y 2DO GRADO

El Pesario **Ring con Soporte con y sin membrana** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



SIN MEMBRANA



CÓDIGO	#	CM
RK1.75	#0	4.45
RK2.00	#1	5.08
RK2.25	#2	5.72
RK2.50	#3	6.35
RK2.75	#4	7.00
RK3.00	#5	7.62
RK3.25	#6	8.25
RK3.50	#7	8.90

El Pesario RING CON SOPORTE tiene las mismas indicaciones que el pesario RING y también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

CON MEMBRANA



CÓDIGO	#	CM
RK1.75S	#0	4.45
RK2.00S	#1	5.08
RK2.25S	#2	5.72
RK2.50S	#3	6.35
RK2.75S	#4	7.00
RK3.00S	#5	7.62
RK3.25S	#6	8.25
RK3.50S	#7	8.90

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de segundo grado, asociado con un cistocele menor.



OVAL

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO

El Pesario **Oval** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas.


Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



OVAL

CÓDIGO	#	CM
OV2.00	#1	5.08
OV2.25	#2	5.72
OV2.50	#3	6.35
OV2.75	#4	6.98
OV3.00	#5	7.60
OV3.25	#6	8.25
OV3.50	#7	8.90
OV3.75	#8	9.52
OV4.00	#9	10.12

Pesario Oval para mujeres con antecedentes de cirugía vaginal, ya que su forma ovalada inhibe su rotación. El Pesario Oval está disponible con o sin membrana de soporte, es de uso común para un prolapso uterino o un cistocele.

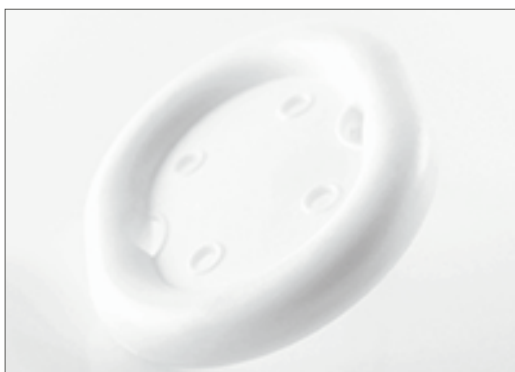

OVAL CON MEMBRANA

CÓDIGO	#	CM
OV2.00S	#1	5.08
OV2.25S	#2	5.72
OV2.50S	#3	6.35
OV2.75S	#4	6.98
OV3.00S	#5	7.60
OV3.25S	#6	8.25
OV3.50S	#7	8.90
OV3.75S	#8	9.52
OV4.00S	#9	10.12

Indicaciones: Recomendado para un prolapso de 1er y 2do grado.



DISH

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO

El Pesario **Dish** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



DISH

CÓDIGO	#	CM
DSH50	#1	5.00
DSH55	#2	5.50
DSH60	#3	6.00
DSH65	#4	6.50
DSH70	#5	7.00
DSH75	#6	7.50
DSH80	#7	8.00
DSH85	#8	8.50

Pesario Dish en forma de plato, disponible con o sin membrana de soporte, con orificios para permitir el drenaje. La membrana flexible del plato apoya y eleva un cistocele reducido.



DISH CON MEMBRANA

CÓDIGO	#	CM
DSH50S	#1	5.00
DSH55S	#2	5.50
DSH60S	#3	6.00
DSH65S	#4	6.50
DSH70S	#5	7.00
DSH75S	#6	7.50
DSH80S	#7	8.00
DSH85S	#8	8.50

Indicaciones: Indicado en Incontinencia por estrés en union con un prolapso de 1er y 2do grado, o un cistocele reducido.



GEHRUNG

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO

El Pesario **Gehrung** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



Gehrung

CÓDIGO	#	CM
GH50S	#0	5.00
GH55S	#1	5.50
GH60S	#2	6.00
GH65S	#3	6.50
GH70S	#4	7.00
GH75S	#5	7.50
GH80S	#6	8.00
GH85S	#7	8.50
GH90S	#8	9.00
GH95S	#9	9.50

Pesario Gehrung sus brazos o alas se apoyan en la pared vaginal posterior. Evita la presión en el recto mientras apoya la pared anterior. Su forma de arco maleable puede ser deformada para ajustarse a la forma de la vagina.

Indicaciones: Útil para un cistocele o rectocele, siendo también de utilidad para aliviar un prolapso uterino. Recomendado para prolapso de 2do y 3er grado.





Dolphin Medical




Ginecología



Laparoscopia



Endoscopia

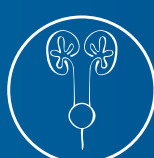

Urología



Cirugía Plástica



Dermatología

www.dolphinmedical.com



VAGIWELL

Dilatadores vaginales para el uso clínico y doméstico

Los dilatadores **Vagiwell** han sido diseñados por mujeres para mujeres que desean ejercitar el piso pélvico por sí mismas. Están indicados para todas las pacientes que requieren un ensanchamiento vaginal, en el caso de Vaginismo, el objetivo principal es considerarlos como un dispositivo que permita la desensibilización del canal vaginal con ejercicios para la introducción de un objeto en la vagina, mediante una asesoría médica.

TABLA DE TAMAÑOS Y MEDIDAS

Tamaño	Color	Diámetro A/B	Longitud C
T.1	Azul claro	12/14 mm	122 mm
T.2	Menta	16/18 mm	135 mm
T.3	Violeta	20/22 mm	150 mm
T.4	Rosado	24/26 mm	163 mm
T.5	Beige	28/30 mm	177 mm

Características:

- Dilatadores vaginales de silicona de grado médico suave.
- Flexible, livianos y discretos.
- Ergonómicos.

Indicaciones:

- Post-parto, en el caso de haber realizado Episiotomía.
- Post-parto, en el caso de haber Desgarro perianal.
- Después de un tratamiento oncológico prolongado con radiación o quimioterapia.
- Post-quirúrgico, para intervenciones ginecológicas con estrechamiento vaginal y retracción cicatricial.
- Vaginismo.
- Post-quirúrgico para cambio de sexo de hombre a mujer.
- Dolor durante exploraciones ginecológicas.
- Dolor durante la introducción de tampones.

Contenido:

- Dilatadores Vagiwell (3 a 5 según Set)
- Gel Animé, lubricante íntimo (50 ml)

Sets Disponibles Dilatadores Vagiwell®



BOLIVIA

- Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- (591-3) 342 2120
- ventasdmb@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

CHILE

- Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- (+56) 2 2952 0165
- ventas@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

- Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- (+57 1) 31 3412 3620
- ventasdmc@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-11062018-REV-001

LAPIZ MARCADOR DE PIEL DOLPHIN

INCLUYE REGLA Y ETIQUETA AUTOADHESIVA

Lápiz marcador de piel Dolphin punta regular, con regla y etiqueta autoadhesiva, resistente a la clorhexidina, estéril en empaque individual.



Otras Especificaciones:

(Alternativa económica)

- Tipo de tinta: Tinta tradicional (Tinta violeta de genciana)
- Color de tinta: Púrpura
- Estéril con regla y etiquetas de medicamentos en blanco.
- Cantidad por caja : 50 unidades
- Procedencia: USA

Indicaciones:

Procedimientos en los que se utilizan soluciones de preparación menos agresivas como Betadine® o Yodo, marcado de pacientes antes de la cirugía, marcado de pacientes intraoperatorio. La mayoría de las aplicaciones quirúrgicas en cirugía plástica.

Código	Descripción Producto	Presentación
1460SRL-DM100	Lápiz marcador de piel Dolphin	Caja x 50 unidades

BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 (591-3) 342 2120
 ventasdmb@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
 (+56) 2 2952 0165
 ventas@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
 (+57 1) 31 3412 3620
 ventasdmc@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical


BCIRIN-05042019-REV-002



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

DOLPHIN SPONGE


LIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRÚRGICAS

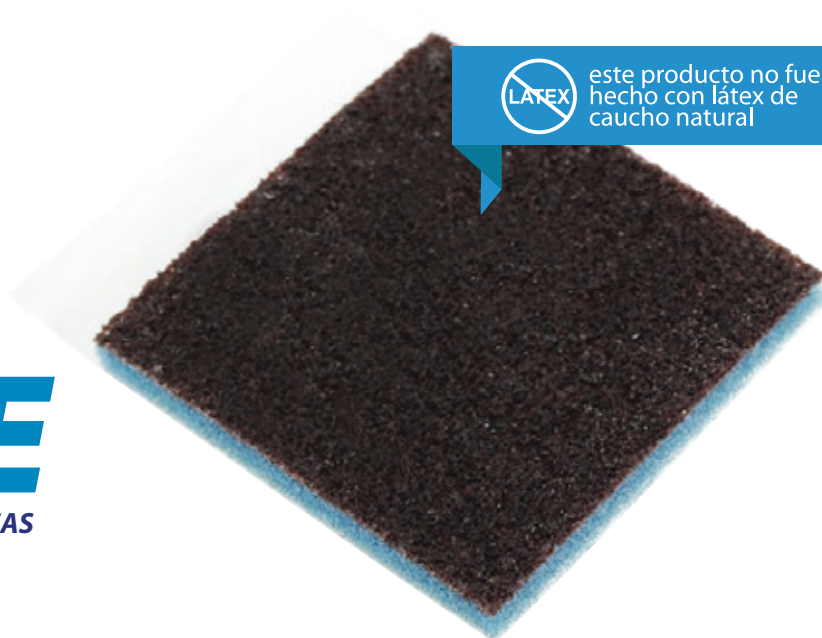

SUPERFICIE ABRASIVA NO EROSIVA

Práctico sistema para la extracción de residuos. Es un dispositivo diseñado para limpiar todo tipo de puntas de electrodos de manera rápida y sencilla, promoviendo la vida útil de estos productos dentro del mismo procedimiento.

El diseño simple es aplicable a electrodos tanto mono como bipolares y está libre de látex.

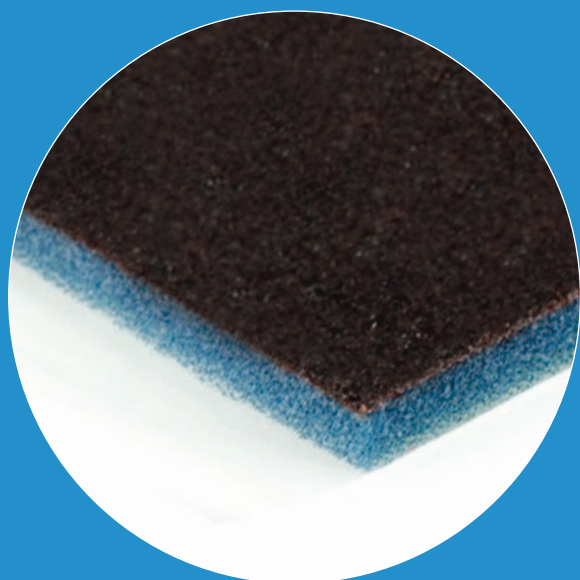

Características Técnicas

- Banda adhesiva: Permite firmemente la fijación sobre una superficie cubierta (pañó de campo u otros)
- Tamaño: 5x6cm
- Superficie abrasiva no erosiva: Permite el preciso y efectivo despegue de materia orgánica adosada a la punta sin erosionar o destruir la propiedad conductiva del electrodo.
- Con marca radiopaca: Garantiza detectabilidad con rayos X
- Acolchado: Evita que se quiebre la punta y no desprende partículas.
- Estéril, libre de látex.

Código	Descripción Producto	Presentación
DM4150006	Dolphin Sponge	50Pcs/Caja

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-2001 2022-REV-001

MANIPULADOR UTERINO

MANIPULADOR / INYECTOR

El **Manipulador e Inyector Uterino Dolphin** es un dispositivo simple, seguro y efectivo para el diagnóstico de laparoscopia diagnóstica, mini laparotomía, exámenes de fertilidad y salpingoplastia. También ayuda al sellado del orificio cervical al inflar el balón con aire o un medio líquido.

El uso del manipulador está indicado en laparoscopia diagnóstica, minilaparotomía, exámenes de fertilidad y procedimientos salpingoplásticos donde se requiere la manipulación del útero.

Características Técnicas:

- Presentado en embalaje individual de papel de grado quirúrgico.
- Libre de Látex
- Individualmente envasados y esterilizados
- Estéril en Oxido de Etileno (OE)
- Medida 33,7cm

Incluye una **jeringa estéril** con la cual debe inflar el balón, antes de la manipulación es esencial para evitar cualquier trauma del útero.



Código	Descripción Producto	Medidas
DMUMI	MANIPULADOR UTERINO DOLPHIN	33,7cm

BOLIVIA



Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



(59 1) 3 342 2120 - (59 1) 7 213 3393



ventasdmb@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

CHILE



Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile



(+56) 2 2952 0165



ventas@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

COLOMBIA



Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia



(57 1) 8052 464 - (57) 317 893 8018



ventasdmc@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-06092018-REV-001