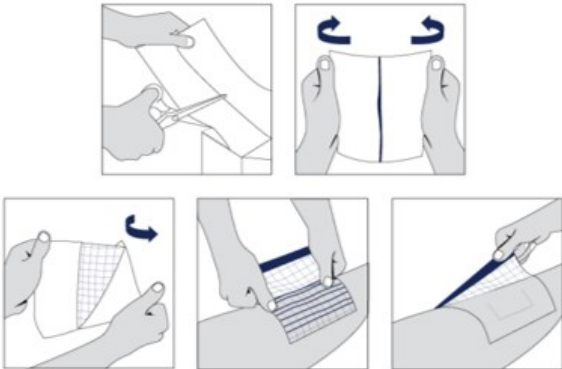


Pharmafix

Nombre Comercial	Pharmafix – PU
Nombre Genérico	Apósito de fijación impermeable transparente
Marca	Pharmafix
Descripción técnica	Es un rollo de cinta adhesiva de película de poliuretano trasparente hipoalergénico de uso médico.
Composición del producto	Capa protectora no adherente de poliestileno, capa transparente adhesiva poliuretano, capa protectora de papel craft siliconado.
Acción del Producto	Adhesivo de poliuretano que se adapta a los contornos de la superficie permitiendo fijación de apósitos primarios y dispositivos médicos.
Indicaciones	•Fijación de apósitos post-operatorios para heridas, gasas de retención y compresas absorbentes. • Para fijar y asegurar catéteres y tubos de drenaje o cualquier otro dispositivo médico que requiera fijación a la piel del paciente.

Pharmafix

Modo de uso	1. Asegúrese de que la piel esté seca y limpia antes de la aplicación. 2. Corte la cinta a la longitud requerida. La longitud de la cinta debe extenderse al menos 1cm fuera del borde del apósito primario o vendaje. 3. No estire ni aplique con tensión sobre áreas donde la cinta adherirse directamente a la piel. 4. Alise la cinta con las yemas de los dedos para asegurar una buena adherencia. 
Precauciones	- No lo use en caso de sensibilidad a alguno de los componentes de la cinta y adhesivos médicos - Para un solo uso. La reutilización causará contaminación cruzada. - Desechar como producto contaminado.

Código	Presentación	Contenido/ Tamaño	
Fix 1010	1 Rollo x caja	10 cm x 10 mt	