

Nombre Comercial	Silver Care
Nombre Genérico	Hidrogel de plata iónica
Marca	Humany Care
Descripción técnica	Hidrogel transparente con plata iónica, antimicrobiano y promotor de la granulación del tejido.
Composición del producto	Glicerina, carbopol, trietanolamina, plata iónica, cloruro de sodio, agua purificada.
Acción del Producto	Los iones de plata se unen a la membrana celular de la bacteria, interfiriendo en el transporte de electrones, alterando el sistema enzimático y el transporte de ATP, altera y modifica el ADN de las bacterias impidiendo la replicación, edificación de bloques de los iones de plata produciendo la lisis celular.
Indicaciones	Tratamiento de heridas de poco a moderado exudado, infectadas, con riesgo de infección o con signos de biofilm, tales como: - Lesiones por presión. - Pie Diabético. - Úlceras de Vasculares. - Quemaduras de 1er y 2do grado en etapa aguda. - Heridas Quirúrgicas infectadas - Heridas post traumáticas - Colgajos y zonas donantes
Modo de uso	Realizar asepsia de la herida, secar con gasas, aplicar Silver Care en presentación de Gel o Apósito. Puede aplicarse con seguridad en heridas tunelizadas, por su condición de gel se adapta al lecho de la herida. Cambio de apósito cada 24 o 48 hrs. Cubrir con gasas y fijar con adhesivos hipo-alérgicos o apósitos secundarios.
Precauciones	Si la herida no mejora en un plazo de 10 días, consultar a médico tratante. Manténgase fuera del alcance de los niños.

SilverCARE^{Ag}

hidrogel para el cuidado de heridas

Código	Presentación	Contenido/ Tamaño	Empaque
1317	Tubo	45ml / 1.5 FL OZ	