


Campos de incisión

- 100% impermeable, previene la migración de bacterias a través del campo
- Buena permeabilidad, evita la concentración de vapor húmedo y mejora la comodidad del paciente
- Libre de alérgenos conocidos
- Flexible y fácil de colocar, con buena adaptación incluso en las áreas más delicadas
- Completamente transparente
- Adhiere bien a la piel y es confortable durante la cirugía y durante la remoción





1 Remueva el papel de protección. Una persona sujeta la pestaña de control y en el lado opuesto, la otra persona sujeta el papel de protección.

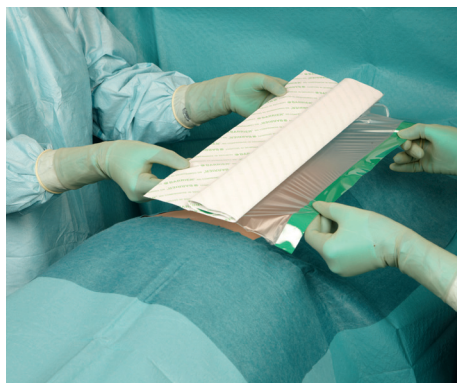

2 Desdoble algunos centímetros del papel de protección y pegue el campo de incisión en el paciente.



3 De espacio, continúe a desdoblar el papel de protección, mientras otra persona adhiere el campo de incisión.



4 Pase la palma de la mano sobre el campo de incisión para obtener una superficie lisa.

Ref.	Tamaño del campo (cm)	Área adhesiva (cm)	Presentación unid. (caja dispensadora/caja de transporte)
801014	10×14	10 x 8	45 / 180
801526	15×26	15 x 20	30 / 120
803026	30×26	30 x 20	25 / 100
804040	40×40	40 x 34	20 / 80
804526	45×26	45 x 20	20 / 80
804555	45×55	45 x 49	15 / 60
805680	56×80	56 x 74	10 / 40



Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. T +46 31 722 30 00. F +46 31 722 34 00. www.molnlycke.com
El nombre y logotipo de Mölnlycke Health Care y BARRIER® son marcas comerciales registradas de Mölnlycke Health Care AB.

Id-code: HQ1001420910ES