

FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

 Código:
 FT-DT-003

 VR 3


 Fecha:
 20-02-2023

WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA CANULAS DE GUEDEL

1. DATOS GENERALES						
NOMBRE GENERICO:	CANULA ORAL Y FARINGUEA DE	SECHABLE	FECHA VIGENCIA REGIS	24/05/2027		
NOMBRE COMERCIAL:	CÁNULA ORAL Y FARINGEA DESECHABLE-CANULA DE GUEDEL-CANULA DE MAYO DESECHABLE-CANULA DE GUEDEL-CANULA DE MAYO					
FABRICANTE:	SUZHOU HENGXIANG IMPORT &		TIPO/GRADO:	DESECHABLE		
PRODUCTO IMPORTADO:	SI	•		7709032795313-7709133483027-		
PRODUCTO ESTERIL:	SI	CODIGO	DE BARRAS(EAN 13)	7709133483034-7709133483058- 7709133483072-7709497911891- 7709971303631-7709971303679-		
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI			7709971303079-		
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS	EL PRODUC	TO ES REUTILIZABLE	NO		
REGISTRO SANITARIO NO.	2017DM-0016338	MODALIDAD	DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER		
TITLU AD DEGICEDO CANUTADIO	WELL MEDICINE PROPLICTO CA	0	_			

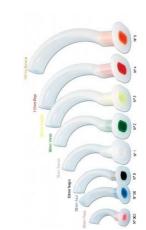

TITULAR REGISTRO SANITARIO WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S

2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

CLASIFICACION DEL RIESGO	CLASE I: CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:	EMPAQUE PRIMARIO	BOLSA PLASTICA/UNITARIO		
MEDIDAS	000(40 mm) - 00 (50 mm)- 0 (60mm)- 1(70mm) - 2(80 mm) - 3(90 mm) - 4(100 mm) - 5(110 mm) - 6(120 mm)	EMPAQUE SECUNDARIO	CAJA PLEGADIZA X 50 UNID		
ENVASE	PAPEL GRADO MEDICO	EMPAQUE TERCIARIO	CAJA CORRUGADA X 500 UNID		
CONDICION DE ALMACENAMIENTO	Mantengase en un lugar fresco y seco.	Emi Agor Terrolanto			

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

NO CONTIENE LATEX

Bloqueador en policarbonato, tubo curvo en pvc

4. INDICACIONES Y USOS

La cánula de Guedel es un simple tubo orofaríngeo curvo y semirrígido de material plástico, que introducido en la boca del paciente, mantiene expeditiva la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire. También se denomina tubo de Mayo.

Para su colocación el reanimador debe realizar una hiperextensión cervical, abriendo la boca de la víctima con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, y procediendo seguidamente a introducir ésta, rotada 180o con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás.