

STERILE EO  CE 0123

Endotracheal tube

TYPE: CUFFED

I.D.: 8.0 mm

O.D.: 10.7 mm

Importado por Well Medicine Products, A.S.



TUBO ENDOTRAQUEAL

STERILE EO



CE 0123

Well Medicine Products, A.S.
Calle 10 de Agosto, 10000, San Juan, P.R.
Tel: (787) 438-1000
Fax: (787) 438-1001

IMPORTADOR: MEDICAL INTERNATIONAL, S.A.
Calle 10 de Agosto, 10000, San Juan, P.R.
Tel: (787) 438-1000
Fax: (787) 438-1001

IMPORTADOR: WELL MEDICINE PRODUCTS, S.A.
Calle 10 de Agosto, 10000, San Juan, P.R.
Tel: (787) 438-1000
Fax: (787) 438-1001

HECHO EN CHINA



Instrucciones de Uso

- * Antes de intubar, desinfecte completamente el manguito.
- * Después de intubar, infle el manguito usando el mínimo de volumen de aire requerido para proporcionar un sellado eficaz.
- * Inmediatamente después de intubar el manguito, ausculte ambos campos pulmonares. Si el sonido de la respiración disminuye o es ausente en uno o ambos campos pulmonares, ajuste según sea necesario.
- * La ubicación del tubo endotraqueal debe ser confirmada por observación de la ubicación de la punta del tubo mediante una radiografía de Tórax.

