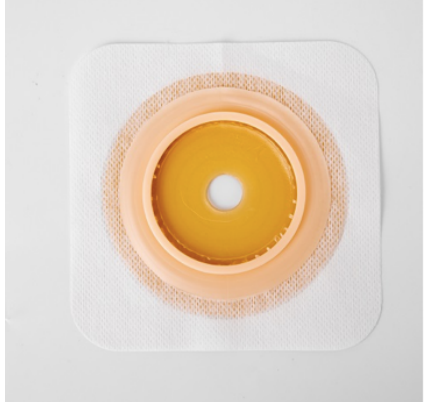


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	VERSION: 01
		CODIGO: FTP-016
		VIGENTE DESDE 16/07/2016
		PAGINA 1 DE 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PRODUCTO		BARRERA HIDROCOLOIDE FLEIXIBLE RECORTABLE	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIAS	250 (45mm) / 260 (57mm) / 270 (70mm)	
	VIDA ÚTIL	3 AÑOS	
	TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO	
	REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM-0022785	
	FABRICANTE	JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCT CO. LTD.	

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	Clase 1
--------------------------	---------

DESCRIPCIÓN	Las barreras hidrocoloides flexibles recortables de OstupMed, están diseñadas para proteger la piel periestomal (alrededor de la estoma) de las excreciones intestinales y de la orina.
-------------	---

CARACTERÍSTICAS	• Flexibilidad: Las barreras hidrocoloides flexibles recortables de OstupMed se adaptan a las diferentes formas de abdomen. • Adaptación: Las barreras hidrocoloides flexibles de OstupMed al ser recortables, permiten que la misma se adapte a los diferentes tamaños y formas de la estoma. • Adhesión: Las barreras hidrocoloides flexibles recortables de OstupMed se mantienen adheridas a la piel proporcionando protección de los efluentes irritantes de la estoma. • Características técnicas: Las barreras hidrocoloides flexibles recortables de OstupMed, vienen en tres referencias, con las cuales se puede obtener diámetros internos de 45mm (ref. 250), 57mm (ref. 260) y 70mm (ref. 270) 
-----------------	---

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda consultar el manual de usuario de la barrera de ostomía, el cual es suministrado con cada caja, antes de ser usada.

1. **Limpieza y preparación de la piel periestomal (alrededor de la estoma)**
Limpie la zona en la cual se pondrá la barrera con agua tibia usando un paño o una toalla de papel suave, luego séquela.
2. **Recortar la barrera**
Dibuje sobre el papel de la barrera de acuerdo con el tamaño y la forma de la estoma, luego corte según el trazo de adentro hacia afuera.
3. **Retire el papel protector del adhesivo de la barrera.**
4. **Adhiera la barrera a la piel periestomal (alrededor de la estoma)**
Pegue la barrera de ostomía en la piel sobre la estoma, moderadamente cerca, comience desde la parte inferior, presione con el dedo por un momento, luego presione hacia arriba suavemente, acerque la barrera a la piel.
5. **Instale la bolsa de ostomía**
Presione la bolsa de ostomía sobre la barrera, al escuchar un sonido de "clic", la bolsa se ha instalado en la barrera de forma segura. Ajuste la bolsa a la mejor posición.

COMPOSICIÓN

La barrera está compuesta por un disco de pasta hidrocoloide, un anillo de conexión, bordes adhesivos y una película protectora de la membrana. Está hecha principalmente de carboximetilcelulosa de sodio, xantano y poliisobutileno. El anillo de conexión está hecho de resina de polietileno (pe); el borde adhesivo de la barrera es de poliéster no tejido.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Están disponibles en color beige en los siguientes tamaños:

- Diámetro interno de 45mm → caja por 5 unidades.
- Diámetro interno de 57mm → caja por 5 unidades.
- Diámetro interno de 70mm → caja por 5 unidades.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 10°C a 30°C.

CÓDIGO DE BARRAS

45mm



57mm



70mm

