

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSIÓN: 01


CÓDIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE GÉNÉRICO	APÓSITO HIDRATANTE DE BIOCELULOSA CELMAT® CON HIALURONATO DE SODIO
NOMBRE COMERCIAL	CELMAT® WOUND H
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2022DM-0026059
TIPO DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR	CARSON PHARMA COLOMBIA SAS
FABRICANTE	BOWIL BIOTECH SP. Z O. O
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO NO INVASIVO
RIESGO	III
REFERENCIAS	10cm x 10cm / 10cm x 20cm / Mascarilla
VIDA ÚTIL	2 AÑOS

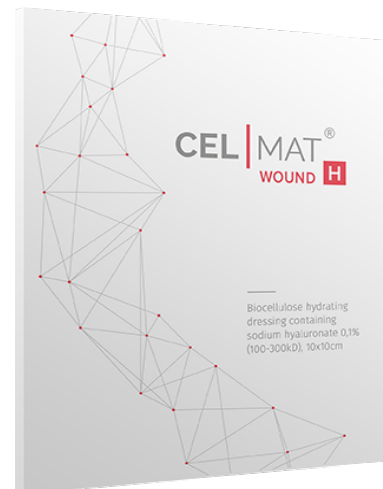

DESCRIPCIÓN

Membrana hidratante de biocelulosa en nanoestructura porosa 3D con hialuronato de sodio al 95%, el cual estimula la activación de las células del sistema inmunitario, fibroblastos, queratinocitos, promoviendo la granulación, epitelización y cierre de la herida.

CARACTERÍSTICAS

CELMAT® WOUND H es una membrana con bionanocelulosa, material completamente natural, sin propiedades tóxicas, no irritante, no alergénico y totalmente biodegradable. Se distingue por su flexibilidad, resistencia mecánica elevada y una excelente hidratación (de aproximadamente 96%) por lo que asegura un ambiente húmedo que favorece los procesos de regeneración. El efecto refrescante conseguido es muy importante para el confort y para aliviar el dolor. Una permeabilidad selectiva, limitada solo a algunos gases y líquidos asegura por su parte un intercambio gaseoso y una termorregulación adecuada, favoreciendo los procesos de regeneración. El hialuronato de sodio contribuye a la hidratación de la piel, crea una capa de protección sobre la epidermis, tonifica la piel y favorece su reconstrucción.

USOS


Puede ser usado en el manejo de heridas crónicas, incluyendo heridas en estadio IV, así como úlceras por presión, úlceras por estasis venosa, quemaduras de primer y segundo grado, cortes, abrasiones y laceraciones de piel.

RECOMENDACIONES DE USO


La frecuencia de aplicación de CelMat® en heridas debe consultarse con un médico. Dispositivo médico clase III para uso profesional.




1
Limpie muy bien el lugar de aplicación de la membrana

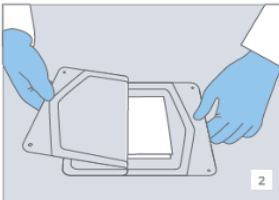

2
Abra el empaque estéril.

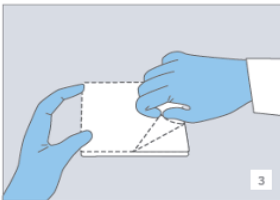

3
Retire los protectores de ambos lados.

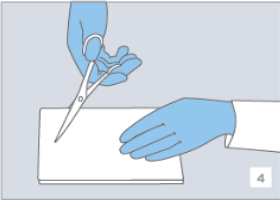

4
Si es necesario, la membrana puede ser ajustada al tamaño deseado, utilizando tijeras estériles.



5
Cualquier lado de la membrana puede ser usado.



6
Opcionalmente, la membrana CelMat® puede ser cubierta con un apósito secundario para prolongar el tiempo de aplicación.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

COMPOSICIÓN	Biocelulosa, hialuronato de sodio y agua purificada.		
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Están disponibles en los siguientes tamaños: 10cm x 10cm. Caja por 1 unidad. 10cm x 20cm. Caja por 1 unidad. Mascarilla. Caja por 1 unidad.		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 10°C a 30°C.		
CÓDIGO DE BARRAS			
CELMAT® WOUND H 10cm x 10cm	CELMAT® WOUND H 10cm x 20cm	CELMAT® FACE H	
 5 905279 374928	 5 905279 374935	 5 905279 374911	