

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	VERSION: 01
		CODIGO: FTP-016
		VIGENTE DESDE 16/07/2016
		PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PRODUCTO		POLVO OSTOMÍA	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO	
	VIDA ÚTIL	3 AÑOS	
	REFERENCIA	1025	
	INVIMA 2021DM-0022785	REGISTRO SANITARIO	
	FABRICANTE	JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCT CO. LTD.	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		Clase 1	
DESCRIPCIÓN		El polvo de ostomía de OstupMed está diseñado para absorber la humedad en la piel periestomal (alrededor de la estoma), manteniéndola seca y reduciendo la irritación.	
RECOMENDACIONES DE USO		Se recomienda consultar el manual de usuario del polvo de ostomía, el cual es suministrado con cada caja, antes de ser usado. Limpieza y preparación de la piel periestomal (alrededor de la estoma) Limpie la piel periestomal con agua tibia. Mantenga la piel limpia y seca. Aplicación del producto Remueva la tapa del frasco, aproxímelo a la zona donde se requiere proteger la piel. Agite el frasco y espolvoree una cantidad apropiada de polvo de ostomía sobre la piel. Esparza el polvo con una gaza o toalla de papel.	
COMPOSICIÓN		El polvo de ostomía está compuesto por carboximetilcelulosa sódica – cmc - na, goma xantana y goma guar.	
PRESENTACIÓN COMERCIAL		Frasco por 25gr.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 10°C a 30°C.	
CÓDIGO DE BARRAS		 7 708375 623017	