

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	VERSION: 01
		CODIGO: FTP-016
		VIGENTE DESDE 16/07/2016
		PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PRODUCTO		BOLSA DRENABLE PARA OSTOMÍA CON CIERRE DE VELCRO	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIA	8104 (45mm) / 8106 (57mm) / 8108 (70mm)	
	VIDA ÚTIL	3 AÑOS	
	TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO	
	REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM-0022785	
	FABRICANTE	JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCT CO. LTD.	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		Clase 1	
DESCRIPCIÓN		Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, están diseñadas para recolectar las excreciones intestinales y de la orina. Han sido fabricadas con materiales que son amables con la piel, cierre mediante velcro.	
CARACTERÍSTICAS		• Protección de la piel: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, tienen un recubrimiento con poliéster no tejido, que impide el contacto del plástico con la piel, disminuyendo la posibilidad de que se presenten irritaciones. • Sistema de cierre: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, cuentan con tres tipos de cierre, mediante pinza, velcro o válvula. • Características técnicas: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed con cierre de velcro se pueden adquirir en tamaños de 45mm (ref. 8104), 57mm (ref. 8106) y 70mm (ref. 8108).	
RECOMENDACIONES DE USO		Se recomienda consultar el manual de usuario de la bolsa de ostomía, el cual es suministrado con cada caja, antes de ser usada. 1. Método de instalación • Sople un poco de aire en la bolsa para evitar que se adhiera. • Una el anillo de conexión de la bolsa de ostomía con el de la barrera. Presione desde la parte inferior a la superior de manera gradual. Al escuchar un sonido de "clic", la bolsa se ha instalado de manera correcta. 2. Prueba de seguridad • Hale de la bolsa de ostomía para comprobar si está conectada correctamente. Nota: antes de instalar la bolsa drenable, asegúrese que la abertura este bien doblada y/o sellada. Revise que no tiene fugas.	
COMPOSICIÓN		La bolsa está compuesta por: la bolsa, un anillo de conexión para adherirse a la barrera y un sistema para drenaje que puede sellarse con pinza o velcro. La bolsa está hecha principalmente con una película multicapa, el respaldo es de tela no tejida de fibra de poliéster, el anillo de conexión está hecho en polímero y la tira de sellado en pe.	

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	VERSION: 01
		CODIGO: FTP-016
		VIGENTE DESDE 16/07/2016
		PAGINA 1 DE 1

PRESENTACIÓN COMERCIAL	Están disponibles en color beige en los siguientes tamaños: • 45mm → caja por 20 unidades. • 57mm → caja por 20 unidades. • 70mm → caja por 20 unidades.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 10°C a 30°C.

CÓDIGO DE BARRAS		
45 mm	57mm	70mm
		