

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSION: 01
CODIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PRODUCTO | | BOLSA DRENABLE PARA OSTOMÍA CON CIERRE DE PINZA | |
|----------------------------|-----------------------|---|--|
| INFORMACIÓN DEL PRDUCTO | REFERENCIA | 5304 (45mm) / 5306 (57mm) / 5308 (70mm) | |
| | VIDA ÚTIL | 3 AÑOS | |
| | TIPO DE PRODUCTO | DISPOSITIVO MÉDICO | |
| | REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2021DM-0022785 | |
| | FABRICANTE | JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCT CO. LTD. | |
| CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | | Clase 1 | |
| DESCRIPCIÓN | | Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, están diseñadas para recolectar las excreciones intestinales y de la orina. Han sido fabricadas con materiales que son amables con la piel, cierre mediante pinza. | |
| CARACTERÍSTICAS | | Protección de la piel: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, tienen un recubrimiento con poliéster no tejido, que impide el contacto del plástico con la piel, disminuyendo la posibilidad de que se presenten irritaciones. Sistema de cierre: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed, cuentan con tres tipos de cierre, mediante pinza, velcro o válvula. Características técnicas: Las bolsas drenables para ostomía de OstupMed con cierre de pinza se pueden adquirir en tamaños de 45mm (ref. 5304), 57mm (ref. 5306) y 70mm (ref. 5308). | |
| RECOMENDACIONES DE USO | | Se recomienda consultar el manual de usuario de la bolsa de ostomía, el cual es suministrado con cada caja, antes de ser usada. 1. Método de instalación Sople un poco de aire en la bolsa para evitar que se adhiera. Una el anillo de conexión de la bolsa de ostomía con el de la barrera. Presione desde la parte inferior a la superior de manera gradual. Al escuchar un sonido de "clic", la bolsa se ha instalado de manera correcta. 2. Prueba de seguridad Hale de la bolsa de ostomía para comprobar si está conectada correctamente. Nota: antes de instalar la bolsa drenable, asegúrese que la abertura este bien doblada y/o sellada. Revise que no tiene fugas. | |
| COMPOSICIÓN | | y un sistema para drenaje que puede sella La bolsa está hecha principalmente con u | anillo de conexión para adherirse a la barrera rse con pinza o velcro. na película multicapa, el respaldo es de tela conexión está hecho en polímero y la tira de |



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSION: 01

CODIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

PAGINA 1 DE 1

| PRESENTACIÓN COMERCIAL | Están disponibles en color beige en los siguientes tamaños: | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Almacenar en un lugar freso y seco, a una temperatura entre 10°C a 30°C. | | | |
| 060100 07 040010 | | | | |

CÓDIGO DE BARRAS

| 45mm | 57mm | 70mm |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 7 7 0 8 3 7 5 6 2 3 8 5 7 | 7 7 0 8 3 7 5 6 2 3 9 4 9 | 7 7 0 8 3 7 5 6 2 3 2 3 9 |