

TAGUM

SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL

DESCRIPCION

TAGUM SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL sutura quirúrgica no absorbible trenzada natural, compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína. Esta proteína es proveniente de la especie domesticada del gusano de seda *Bombyx mori* de la familia *Bombycidae*. El filamento es tratado para remover las ceras naturales.

La sutura se presenta blanca o pigmentada de negro y cubierta de silicona lo cual le proporciona un paso suave por los tejidos y un adecuado manejo del producto.

Producto esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

TAGUM SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL está indicada para su uso en aproximaciones de tejido blando en general y/o ligadura, incluyendo su uso en procedimientos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos.

ACCIONES

TAGUM SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL produce una reacción inflamatoria en tejidos, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido fibroso. La sutura no es absorbida, la degradación progresiva de la fibra puede provocar la pérdida gradual de la resistencia a la tensión de la sutura.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgica para quirófano.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas.

CONTRAINDICACIONES

El uso de esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades conocidas a la seda. Debido a la pérdida gradual de la resistencia tensión se recomienda que la sutura de seda no se utilice donde se requieran una retención permanente de tejidos.

ADVERTENCIAS

- Dispositivo de uso único, no re-esterilizar.
- Descartar las hebras restantes.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico, ni con gasa.
- El riesgo de dehiscencia de la herida puede variar de acuerdo con el sitio de aplicación.
- Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos quirúrgicos y técnicas que involucren suturas no absorbibles antes de su empleo.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de suturas, se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas asociadas con el uso de esta sutura incluyen: reacción inflamatoria aguda, formación de cálculos en las vías urinarias y biliares cuando se produce un contacto prolongado con soluciones salinas tales como la orina y la bilis, dehiscencia de heridas por pérdida gradual de la fuerza tensil.

PRESENTACIONES

TAGUM SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL está disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con / sin aguja de acero quirúrgico. Disponibles en cajas por 12, 24 y 36 unidades

CONSERVACION

En envases bien sellados para mantener la esterilidad.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, alejado de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor.

TAGUMEDICA S.A.
AV. MAQUINARIAS N° 2414 - LIMA - PERU
Telf: 336-8101
E-mail: info@tagumedica.com
Web site: www.tagumedica.com