

**POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO
SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA
PREMIUM**

DESCRIPCION

POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA PREMIUM es una sutura quirúrgica sintética absorbible antibacterial, compuesta de un copolímero 90% glicolide y 10% L-lactide, cubierta del poli(glicolide co-lactide), estearato de calcio y acetato de clorhexidina. La sutura se presenta violeta o beige.

Producto Esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA PREMIUM está indicada para usarse en todo tipo de aproximación y ligadura de tejidos blandos. Excepto en cirugía oftálmica, cardiovascular y nerviosa.

ACCIONES

POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA PREMIUM causa una mínima reacción inflamatoria aguda la cual ocurre seguida de una capa microscópica de tejido conectivo fibroso que crece en el material de la sutura, la hidrólisis de la sutura causa una disminución de la fuerza tensil, seguida por una pérdida de masa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgica para quirófano.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas.

CONTRAINDICACIONES

POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA PREMIUM no debe utilizarse donde se requiera la aproximación de tejido bajo tensión, no debe utilizarse en pacientes con conocida alergia a los componentes.

ADVERTENCIAS

- Dispositivo de uso único, NO RE-ESTERILIZAR.
- Descartar las hebras restantes no usadas.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico ni con gasa.
- Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos quirúrgicos y técnicas que involucren suturas absorbibles antes de su empleo.

- El uso de esta sutura puede ser inadecuado en pacientes de edad, desnutridos o debilitados o pacientes en condiciones que puedan retardar la cicatrización de la herida.
- ¡No usar la sutura si el envase inmediato está abierto o dañado! Desechar las suturas abiertas no utilizadas
- Los usuarios han de tener cuidado cuando manejan agujas quirúrgicas para evitar perforaciones inadvertidas. Desechar las agujas en recipientes apropiados.
- Para el descarte de suturas usadas adoptar medidas de descarte considerando riesgo de contaminación biológica y material punzante.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de suturas se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.

REACCIONES ADVERSAS

Algunas reacciones adversas han sido reportadas las cuales incluyen falta de soporte adecuado para el cierre de la herida donde puede ocurrir una expansión, estiramiento o distensión, reacciones de inflamación, fibrosamiento y granulación del tejido, una irritación localizada cuando se dejan las suturas en la piel por más de siete días, retraso en la absorción debido a la falta de irrigación del tejido, formación de cálculos en tractos urinarios y biliar y su uso en pacientes debilitados.

PRESENTACIONES

POLIGLACTIN PLUS ANTIBACTERIAL TRENZADO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL CON AGUJA PREMIUM beige o teñida de violeta, está disponible en cajas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ó 36 sobres, cada sobre puede contener una unidad de sutura o una unidad de multiempaque de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ó 25 suturas.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperaturas de 25°C como máximo y un máximo de 60% de humedad, proteger de la luz solar y de fuentes de calor.

TAGUMEDICA S.A.

AV. MAQUINARIAS N° 2414 - LIMA - PERU

Telf.: 3368101

E-mail: info@tagumedica.com

Web site: www.tagumedica.com

IFU-042/01