

TAGUM
ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA SUTURA SINTETICA
ABSORBIBLE ESTERIL

TAGUM
ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO SUTURA SINTETICA
ABSORBIBLE ESTERIL

DESCRIPCION

TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL una sutura quirúrgica absorbible trenzada compuesta de un homopolímero del ácido glicólico. Es no antigénica, apirógena y flexible. La sutura se presenta Incolora o coloreada de color violeta.
Producto esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL esta indicada en todo tipo de aproximación de tejidos incluyendo la cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular, microcirugía o tejido nervioso. Esta sutura también puede usarse como una ligadura.

ACCIONES

TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL puede ser utilizada en los tejidos causando una mínima reacción tisular la cual ocurre seguida de una capa microscópica de tejido fibroso que crece en el material de la sutura.
Estudios en animales muestran una mínima absorción de 7 a 15 días, absorción significativa a los 30 días y una máxima resorción de 60 a 90 días. La absorción se inicia con una pérdida progresiva de la fuerza tensil mientras se va dando la hidrólisis del polímero, ésta es seguida de una pérdida de masa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgica para quirófano.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas

CONTRAINDICACIONES

El uso de esta sutura está contraindicado en lugares donde se requiera retención permanente de tejidos.

ADVERTENCIAS

- Dispositivo de uso único, no re-esterilizar.
- Descartar las hebras restantes.

- No frotar la hebra con el guante quirúrgico ni con gasa.
- Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos quirúrgicos y técnicas que involucren suturas absorbibles antes de su empleo.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de suturas, se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas asociadas con el uso de esta sutura incluyen: reacciones de inflamación, fibrosamiento y granulación del tejido, una irritación localizada cuando se dejan las suturas en la piel por más de siete días, retraso en la absorción debido a la falta de irrigación del tejido, su uso en pacientes debilitados.

PRESENTACIONES

TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL está disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con / sin aguja de acero quirúrgico.
Disponibles en cajas por 12, 24 y 36 unidades

CONSERVACION

En envases bien sellados para mantener la esterilidad.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, alejado de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor.

TAGUMEDICA S.A
AV. MAQUINARIAS N° 2414 – LIMA – PERU
Telf.: 336-8101
E-mail: info@tagumedica.com
Web site: www.tagumedica.com