

TAGUM

CATGUT CROMICO SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL

DESCRIPCION

TAGUM CATGUT CROMICO SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL sutura quirúrgica absorbible biológica, preparada de colágeno derivado del tejido conjuntivo purificado de res; es adicionalmente sometida a un tratamiento con sales de cromo para aumentar su resistencia a la absorción, proporcionando un soporte más duradero para la cicatrización de la herida.

La sutura es preservada en una solución de alcohol isopropilico para mantener la suavidad y flexibilidad de la hebra.

Producto esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

TAGUM CATGUT CROMICO SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL está indicada en aproximaciones y ligaduras de tejidos blandos como: cierre general, cuticular, gastrointestinal, cirugía pediátrica, ginecología, obstetricia, plástica y reconstructiva, ortopedia, traumatología y urología. No está indicado su uso en tejido cardiovascular y nervioso.

ACCIONES

TAGUM CATGUT CROMICO SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL localmente produce reacción inflamatoria seguida de un proceso de absorción enzimático que provoca pérdida gradual de la fuerza tensil, concluyendo con la absorción de la sutura. La aplicación de la sutura en tejido infectado y altos niveles de enzimas proteolíticas pueden acelerar la absorción de la sutura.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Verificar el nivel de solución preservante en el blister.
- Mantener la sutura en solución preservante y retirarla del empaque primario al momento que va a ser utilizada.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgico para quirófano.
- Para borrar la memoria, tomar la hebra a 5mm de la unión hilo aguja y extremo distal y estirar suavemente.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas.

CONTRAINDICACIONES

Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.

El uso de esta sutura puede ser inapropiado en ancianos, desnutridos o pacientes debilitados que padecen cáncer, anemia, obesidad, diabetes, infección u otras condiciones que puedan retardar la curación de la herida o acelerar la absorción del catgut.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de sutura se deberá tener cuidado al evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o agujas. La seguridad del nudo requiere la aplicación de técnicas quirúrgicas aceptadas.

ADVERTENCIAS

- Dispositivo de uso único, no re-esterilizar.
- Descartar las hebras restantes.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico, ni con gasa.
- Los usuarios deben estar familiarizados con procedimientos y técnicas quirúrgicas que involucren el uso de suturas quirúrgicas absorbibles.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas asociadas con el uso de suturas absorbibles incluyen: dehiscencia de heridas debido a técnicas quirúrgicas inadecuadas, si esto ocurriera proporcionar adecuado apoyo a la herida, falta de soporte adecuado para la herida en pacientes de edad, desnutridos, debilitados o en condiciones que puedan retardar la cicatrización de la herida, reacciones alérgicas en pacientes con sensibilidad al colágeno o al cromo, mínima reacción tisular inflamatoria y dolor, eritema en el sitio de la herida.

PRESENTACIONES

TAGUM CATGUT CROMICO SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL está disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con / sin aguja de acero quirúrgico.

Disponibles en cajas por 12, 24 y 36 unidades

CONSERVACION

En envases tipo blister bien sellados para mantener la esterilidad de la sutura y el nivel de solución preservante.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, alejado de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No apilar más de 06 cajas verticalmente, ni comprimir.

TAGUMEDICA S.A.
AV. MAQUINARIAS N° 2414 - LIMA - PERU
Telf.: 336-8101
E-mail: info@tagumedica.com
Web site: www.tagumedica.com