

TAGUM
POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE
ESTERIL

TAGUM
POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO INCOLORA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE
ESTERIL

DESCRIPCION

TAGUM POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA / INCOLORA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL es una sutura monofilamento absorbible, la cual puede presentarse incolora o violeta, coloreada con colorantes inocuos. Es apirógena, no antihigiénica y altamente flexible.
Producto esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

TAGUM POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA / INCOLORA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL esta indicada para usarse en todo tipo de aproximación de tejidos blandos, esta sutura también puede usarse como una ligadura.

ACCIONES

TAGUM POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA / INCOLORA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL puede ser utilizada en los tejidos causando una mínima reacción tisular, la que es seguida de una encapsulación de tejido conectivo fibroso. Debido a la hidrólisis ocurre una pérdida progresiva de la resistencia a la tensión.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgica para quirófano.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas

CONTRAINDICACIONES

El uso de esta sutura está contraindicado en lugares donde se requiera retención permanente de tejidos. El uso de esta sutura puede estar contraindicado en pacientes desnutridos o debilitados o que presenten condiciones que retarden la cicatrización. La seguridad y efectividad de las suturas de polidioxanona no ha sido establecida en tejido nervioso, cardiovascular o en microcirugía.

ADVERTENCIAS

- Dispositivo de uso único, no re-esterilizar.
- Descartar las hebras restantes.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico ni con gasa.

- Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos quirúrgicos y técnicas que involucren suturas absorbibles antes de su empleo.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de suturas, se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.
El empleo de tirones adicionales puede ser particularmente apropiado cuando se anude monofilamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Debido al periodo prolongado de absorción se ha observado un grado de irritación, deshiscencia de la herida, falta de soporte adecuado en lugares donde ocurra distensión, retraso en la absorción debido a la falta de irrigación del tejido. Todo material extraño en presencia de contaminación bacteriana puede favorecer la infección.

PRESENTACIONES

TAGUM POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA / INCOLORA SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL está disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con / sin aguja de acero quirúrgico.
Disponibles en cajas por 12, 24 y 36 unidades

CONSERVACION

En envases bien sellados para mantener la esterilidad.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, alejado de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor.

TAGUMEDICA S.A
AV. MAQUINARIAS Nº 2414 – LIMA – PERU
Telf.: 336-8101
E-mail: info@tagumedica.com
Web site: www.tagumedica.com