

TAGUM

POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CARDIOVASCULAR SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL

DESCRIPCION

TAGUM POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CARDIOVASCULAR SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL, es una sutura quirúrgica monofilamento no absorbible, compuesta de una hebra de polímero isotáctico de polipropileno. La sutura se presenta pigmentada de azul. Producto Esterilizado con Oxido de Etileno.

INDICACIONES

TAGUM POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CARDIOVASCULAR SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL, está indicada para la aproximación y ligadura en procedimientos cardiovasculares.

ACCIONES

TAGUM POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CARDIOVASCULAR SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL, localmente produce mínima reacción tisular por su naturaleza inerte, brinda buena aproximación de los bordes de la herida, su aplicación es seguida de una gradual encapsulación de la sutura por tejidos fibrosos; no se absorbe ni es atacado por líquidos tisulares manteniendo su resistencia tensil por largo tiempo. En cirugía vascular disminuye el riesgo de trombosis. No se adhiere a los tejidos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Leer la descripción del material.
- Manejo de la sutura según protocolo de asepsia médico quirúrgico para quirófano.
- Colocar la aguja correctamente en el porta agujas.
- Para borrar la memoria de la hebra, tomar la hebra a 5mm de la unión hilo-aguja, buscar el extremo distal de la misma y estirarla completamente.
- Para suturas monofilamento puede ser necesario adicionar 1 ó 2 nudos.

CONTRAINDICACIONES

No se conoce. Son suturas de naturaleza inerte.

ADVERTENCIA

- Dispositivo de uso único, no re-esterilizar
- Descartar las hebras restantes.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico, ni con gasa.
- Los usuarios deben estar familiarizados con procedimientos quirúrgicos y técnicas que involucren suturas no absorbibles antes de su empleo.

PRECAUCIONES

En el manejo de materiales de suturas, se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.

El empleo de tirones adicionales puede ser particularmente apropiado cuando se anude monofilamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas asociadas con el uso de esta sutura incluyen: dehiscencia de heridas, heridas infectadas debido a técnicas quirúrgicas inadecuadas.

PRESENTACIONES

TAGUM POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CARDIOVASCULAR SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL, está disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con aguja(s) de acero quirúrgico. Disponibles en cajas por 12, 24 y 36 unidades

CONSERVACION

En envases bien sellados para mantener la esterilidad.

ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, alejado de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor.

TAGUMEDICA S.A.
AV. MAQUINARIAS N° 2414 - LIMA - PERU
Telf.: 336-8101
E-mail: info@tagumedica.com
Web site: www.tagumedica

