

Nombre Técnico del Producto: *Canister 45 ml*

Marca: KCI VAC

Fabricante: KCI INC

Registro Invima: 2017DM-0016167

Material de elaboración:

- Recolector transparente, estéril, de material ABS, desechable, sellado



Clasificación del riesgo: clase: IIb

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Kit Unidad estéril

Contenido del KIT:

Recolector transparente con capacidad de 45 cc También posee tubería y conector para apósitos prevena

Indicaciones de uso: Indicado para recolectar el exudado de las heridas manejadas con terapia de presión negativa

Recomendaciones:

No reutilizar ya que puede provocar la contaminación o infección de la herida.

El Contenedor o cánister V.A.C.® deberá cambiarse cuando esté lleno (sonará la alarma) o al menos una vez a la semana para controlar el olor:

Precauciones: Si se produce una hemorragia activa de forma repentina o abundante durante la Terapia V.A.C.®, o si se observa sangre (rojo brillante) en el tubo o en el contenedor, detenga inmediatamente la Terapia V.A.C.

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

Contraindicaciones: Ninguna

