

División Hospitalaria

Apósito Transparente

Tegaderm™ con Pad

3582, 3584, 3586, 3589, 3590, 3591, 3593

15-Enero-2019

Ficha Técnica



Descripción

Apósito estéril transparente con marco de aplicación y almohadilla central absorbente no adherente

Características y Beneficios

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo Virus VHB y VIH, previniendo la contaminación externa de las heridas
- El apósito cuenta con una almohadilla central que absorbe los fluidos de la herida reduciendo el potencial de maceración alrededor de los bordes de la misma
- Por su construcción especial, la almohadilla absorbe 2 a 3 veces más que la gasa tradicional sin adherirse al lecho de la herida. No se deshace ni deja fibras sobre la herida, lo que no causa trauma al paciente en el momento de la remoción del apósito
- Es el producto ideal para el cuidado de la herida quirúrgica en reemplazo del apósito tradicional. Permite monitorear el sangrado de la herida y la piel adyacente, sin necesidad de remover el apósito, lo que minimiza costos de insumos y tiempos de enfermería
- Ofrece protección al personal de la salud contra la exposición a la sangre y los exudados
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, lo que permite la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y bióxido de carbono, para mantener el funcionamiento normal de la piel debajo del apósito, sin comprometer el funcionamiento normal de la piel.
- Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente, lo que brinda mayor comodidad
- Su adhesivo es hipoalergénico y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma.
- Los apósitos transparentes con Pad pueden permanecer hasta 96 horas sobre la herida quirúrgica, según el nivel de exudado.
- Ingenioso sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil la colocación del apósito en forma precisa y segura en cada ocasión, incluso con guantes.
- Radio lúcido no interfiere con imágenes diagnósticas

Composición:

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Almohadilla: Fibras de rayón no tejido (material absorbente) entre dos capas de polietileno poroso material absorbente
- Adhesivo: Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
- Marco y liner: Papel Kraft poli cubierto siliconado

Usos y aplicaciones

El apósito transparente Tegaderm con Pad está recomendado para el manejo de las heridas quirúrgicas y crónicas en aplicaciones como:

- Cirugía Mayor, tales como cardiovascular, neurocirugía y ortopedia
- Manejo de la herida en cirugía estética reparativa
- Cirugía laparoscópica
- Pacientes sometidos a hidroterapia
- Manejo de la herida en cirugía menores, remoción de lunares, cirugía facial, etc.
- Como segundo apósito en el manejo de heridas crónicas
- Abrasiones, laceraciones, quemaduras superficiales
- Se sugiere su uso dentro de las primeras 24 horas después de la inserción de un catéter (*Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares*)

Instrucciones de uso

Selección del apósito

Escoja un apósito lo suficientemente grande para proveer al menos 2 a 3 cm de margen para la adhesión sobre piel seca y sana alrededor de la herida.

Preparación del sitio

- Prepare el sitio de acuerdo con los protocolos de la institución.
- Asegúrese que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones.
- Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesión.

Aplicación

- Abra el paquete y retire el apósito estéril.
- Desprenda el recubrimiento del apósito (liner), que expone la superficie adhesiva
- Usando el marco de referencia posicione el apósito sobre la herida, verificando que quede cubierta completamente por la almohadilla.
- Haga presión uniformemente sobre los bordes del apósito
- Retire lentamente el marco de aplicación mientras que al tiempo refuerza los bordes del apósito.
- Ajuste y selle el apósito para que quede ceñido sobre la piel sana alrededor de la herida.

Cuidado del sitio:

- Cambie el apósito de acuerdo con los protocolos de la institución, o cuando sus propiedades protectoras se vean afectadas

Remoción del apósito:

- Tome uno de los bordes del apósito transparente y despréndalo lentamente hacia atrás en 180° o plegado sobre sí mismo, en vez de removerlo hacia arriba. También puede estirar suavemente la porción transparente, en forma paralela a la piel para liberar el adhesivo. Puede hacer uso de un removedor de adhesivo médico para facilitar la remoción si lo considera necesario.

Precauciones y advertencias

- Verifique al momento de aplicar el apósito que la piel alrededor de la herida este limpia y seca de manera que la parte transparente se pueda adherir bien sobre la piel sana.
- No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño mecánico a la piel.
- El apósito puede ser usado sobre una herida infectada, cuando se encuentra bajo supervisión de un profesional de la salud.
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

Vida útil del producto:

Los apósitos tienen 3 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).



Presentación

Stocknumber	No. De Catálogo	Referencia	Und. /Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70200748880	3582	Tegaderm™ con Pad 5x7cm	50	INVIMA 2017DM-0000455R-1	IIb
70200748898	3584	Tegaderm™ con Pad 6x10cm	50		
70200748906	3586	Tegaderm™ con Pad 9x10cm	25		
70200748930	3589	Tegaderm™ con Pad 9x15cm	25		
70200748948	3590	Tegaderm™ con Pad 9x20cm	25		
70200748955	3591	Tegaderm™ con Pad 9x25cm	25		
70200748963	3593	Tegaderm™ con Pad 9x35cm	25		

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

Nit: 860.002.693-3
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País