

MSD

3M™ Health Care Academy

Tegaderm™ Film

Apósito Transparente adhesivo

Descripción

Los apósitos Tegaderm™ están compuestos por una fina película transparente de poliuretano estéril cubierto por un adhesivo de acrilato, hipoalergénico, y libre de látex.

El apósito posee una membrana semipermeable que permite un buen intercambio de oxígeno y vapor húmedo, es resistente al agua e impermeable a líquidos, bacterias, virus, suciedad y fluidos corporales (los análisis de laboratorio in vitro han demostrado que los apósitos Tegaderm™ proporcionan una barrera contra virus como el VIH VHC, siempre que permanezcan intactos y sin filtraciones o fugas). Un apósito intacto provee protección contra contaminación externa.

Puede ser colocado en forma precisa y segura, incluso con una sola mano, gracias a su sistema de aplicación tipo marco.

Uso

- ✓ Cubrir y proteger sitios de inserción de catéteres
- ✓ Cubrir y proteger heridas
- ✓ Apósito secundario en heridas
- ✓ Protección de la piel en riesgo de daño por roce y fricción
- ✓ Fijación de dispositivos a la piel
- ✓ Proteger quemaduras de primero y segundo grado

Características Físicas y Químicas

Tegaderm™ está compuesto por una película transparente de poliuretano y adhesivo hipoalergénico a base de acrilato.



Tegaderm™ Film

Apósito Transparente adhesivo

Ventajas y Beneficios de Uso

- Es transparente, permite la monitorización continua del sitio donde se ha aplicado permitiendo detectar precozmente posibles complicaciones
- Membrana Semipermeable que permite el intercambio gaseoso de la piel e impide la entrada de agua, bacterias, virus, suciedad y fluidos corporales
- Facilita la higiene y bienestar, ya que el paciente se puede bañar sin poner en riesgo la integridad del apósito
- Se adapta a sitios anatómicos complejos, incluso cuando las extremidades se flexionan o se extienden
- Es Hipoalergénico, es decir, reduce el riesgo de una reacción alérgica
- Es suave con la piel, posee una buena adherencia para un uso prolongado en el tiempo.
- El apósito viene en presentación estéril.

Tiempo de vida en el anaquel

La fecha de caducidad viene impresa en cada caja y envoltorio del apósito Tegaderm™. Se pueden identificar con los símbolos de lote y reloj.

Recomendaciones - Advertencias

- Antes de aplicar el apósito se debe lograr la hemostasia en el sitio de inserción del catéter o la herida
- Evite estirar el apósito durante su aplicación, ya que si lo aplica con tensión puede causar un trauma mecánico en la piel.

- Asegúrese de que la piel esté limpia y seca, sin residuos de jabones u otros productos de aplicación tópica. Si se ha utilizado una solución antiséptica, deje que seque completamente antes de aplicar el apósito para evitar la irritación de la piel y garantizar una buena adhesión
- Si el sitio está infectado, este apósito solo deberá utilizarse bajo vigilancia de un profesional de salud
- Los ungüentos antimicrobianos que contienen glicoles de polietileno podrían comprometer la resistencia de los apósitos
- No debe reesterilizarse
- Para optimizar resultados, guárdelo a temperatura ambiente. Evite el calor y la humedad excesivos. Consulte la fecha de vencimiento que está impresa en cada paquete para conocer vida útil.

Aprobaciones

Producto con Registro Sanitario No.

Presentación

Código	Descripción	Cantidad
1624W	2 3/8 pulg x 2 3/4 pulg (6 x 7 cm)	Caja x 100 bolsas por 1 apósito
1626W	4 pulg x 4 3/4 pulg (10 x 12 cm)	Caja x 50 bolsas por 1 apósito
1628	6 pulg x 8 pulg (15 x 20 cm)	Caja x 10 bolsas por 1 apósito.
1629	8 pulg x 12 pulg (20 x 30 cm)	Caja x 10 bolsas por 1 apósito.



División Cuidados para la Salud

Canaval y Moreyra 641. Corpac San Isidro, Lima 15036
Teléfono: 0511-2242728

Impreso en Lima- Perú
© 3M™ 2021. Todos los derechos reservados