



División Hospitalaria

Cinta Quirúrgica Micropore™ Blanco 1530

26-Ene-2018

Ficha Técnica



Descripción

Cinta quirúrgica microporosa de color blanco hipoalergénica

Características y Beneficios

- Cinta adhesiva hipoalergénica y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma
- Su respaldo microporoso permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel
- El adhesivo acrílico es sensible a la presión, es decir su nivel de adherencia aumenta en el tiempo
- Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo.
- Mantiene su adherencia aún en ambientes húmedos y/o aplicaciones prolongadas (>72 horas)
- Buena adaptabilidad a sitios anatómicos complejos
- Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente
- Excelente apariencia que mimetiza el color de la piel

Composición:

- Respaldo: Fibras de rayón no tejido
- Adhesivo: Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión

Usos y aplicaciones

La cinta quirúrgica Micropore™ color blanco está recomendada para fijar vendajes, inmovilización y uso general en aplicaciones como:

- Curaciones generales, cirugía plástica, oftálmica, otorrino y curaciones menores



- Indicado en pieles delicadas o frágiles como las de los pacientes neonatos, geriátricos, pediátricos y oncológicos bajo quimioterapia o radiación
- Fijación de dispositivos en general, tales como líneas de catéteres centrales y periféricos, sondas, drenes, tubos oro traqueales, entre otros
- Recomendado para fijación de vendajes con alta frecuencia de cambio
- Fijación de apósitos pequeños o medianos y estabilización de tubos y drenajes livianos
- Aseguramiento de los bordes de las bolsas de ostomía

Instrucciones de uso

- Seleccione el tipo y el tamaño adecuado de cinta para la aplicación; la cinta debe exceder al menos 2 cm más allá del límite del apósito o dispositivo
- Corte el vello si es necesario
- Aplique la cinta siempre sobre la piel limpia y seca
- Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión
- Evite tocar el adhesivo de la cinta
- Si la cinta es colocada sobre una articulación posicione anatómicamente la zona del cuerpo antes de adherirla
- Utilice tijeras para un borde más preciso

Nota: El uso de películas protectoras sobre la piel del paciente antes de aplicar una cinta quirúrgica es recomendable para proteger la piel en el momento de la remoción

Para remover la cinta:

- Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en forma lenta y en la dirección del crecimiento del pelo corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella
- Inicie la remoción de la cinta con un trozo pequeño de cinta aplicada en una de las esquinas de la cinta adherida
- La remoción puede ser facilitada haciendo uso de un removedor de adhesivo de uso médico o una loción humectante aplicada en el punto de remoción de la cinta

Precauciones y advertencias

- No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel tales como desprendimiento epidérmico
- Las cintas quirúrgicas son productos limpios, pero no estériles. Por lo tanto, no deben ser aplicadas directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV.
- Elija la cinta adecuada de acuerdo a las características del dispositivo, la piel del paciente y el tiempo de aplicación requerido

Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.



Vida útil del producto:

La cinta quirúrgica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	Referencia	Producto	Und. / Caja	Cajas / Corrug.	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70200412230	1530-1/2"	Micropore™ Blanco x 12 mm (1/2") x 9.1 m	24	10	INVIMA 2017DM-0016689	I
70200534694	1530-1"	Micropore™ Blanco x 24mm (1") x 9.1 m	12	10	INVIMA 2017DM-0016689	I
70200534702	1530-2"	Micropore™ Blanco x 48 mm (2") x 9.1 m	6	10	INVIMA 2017DM-0016689	I
70200412263	1530-3"	Micropore™ Blanco x 72 mm (3") x 9.1 m	4	10	INVIMA 2017DM-0016689	I

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



3M Bogotá

Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

Nit: 860.002.693-3

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co

Contáctenos

email: 3mcontacto@mmm.com

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá

01-8000-113636 Resto del País