



División Hospitalaria

Campo de Incisión

Steri-Drape™ 2

2037, 2040, 2045

21/11/2011

Ficha Técnica



Descripción

Campo de incisión estéril

Características y Beneficios

- Proporciona una superficie estéril sobre la piel, desde el principio de la cirugía, actuando como una barrera para prevenir la migración de microorganismos de la piel al sitio de incisión
- Conformar una barrera física y mecánica. Previene el paso de los fluidos de un área no estéril a una estéril
- Los campos adhesivos quirúrgicos están fabricados con un material transparente, flexible y respirable, que inhibe la penetración de los fluidos, para reducir el riesgo de exposición a la sangre y fluidos corporales
- Se adhieren perfectamente a los bordes de la herida
- Producto de único uso. Disponible en varios tamaños para ajustarse a los diferentes procedimientos quirúrgicos
- De fácil uso. Resistentes a la rotura. Se ajustan fácilmente a los contornos corporales
- De uso externo únicamente. Hipoalergénico y Libre de Látex.

Composición:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • Respaldo: | Película transparente de poliéster |
| • Adhesivo: | Adhesivo de Acrilato |
| • Líner: | Papel siliconado |
| • Bolsa de Empaque: | Papel y Polietileno |

Usos y aplicaciones

Los campos de incisión estériles 3M™ Steri-Drape™ están diseñados como barrera mecánica a la flora de la piel en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.





Instrucciones de uso

- Desinfecte el sitio quirúrgico según los protocolos de su institución o rutina recomendada por el médico
- Deje secar completamente la piel
- Sostenga el campo de incisión algunos centímetros sobre la piel intacta. Sostenga el campo por los bordes no adhesivos. Desprenda el papel protector del adhesivo
- Cuando el símbolo “stop” aparezca, detenga el desprendimiento del papel
- Usando una toalla estéril, aplique presión firme sobre la película, haciendo contacto primero en el área donde va a ser realizada la incisión, para asegurar un buen contacto con la piel
- Continúe pegando el campo sin aplicar tensión, alisando el campo desde el centro hacia la periferia para eliminar posibles arrugas
- Continúe desprendiendo el papel liner hasta completar la aplicación del campo
- Al finalizar el procedimiento quirúrgico, desprender sólo los bordes que limitan con la herida. Suturar la herida. Luego retirar el campo de incisión
- Para remover retire lentamente el campo hacia atrás en un ángulo de 180°. Para esto doble completamente la película sobre sí mismo, manteniendo el ángulo mientras desprende la película de la piel.
- Durante la remoción sostenga el pulgar y la mano que retiran el campo, lo más cerca posible de la unión entre el film y el adhesivo. Con esto se evita el estiramiento de la piel
- La piel de los pacientes mayores es típicamente más frágil y requiere mayores cuidados cuando se aplican o remueven productos adhesivos como los campos de incisión

Precauciones y advertencias

- Usar siempre sobre la piel limpia y seca
- No desfibrilar a través de los campos de incisión plásticos, ya que la corriente puede formar un arco o producir una desfibrilización ineficiente
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

Vida útil del producto:

Los campos tienen 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).



Presentación

Stocknumber	No. Catálogo	Referencia	Und. / Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70-2005-3988-3	2037	3M™ Steri-Drape™ Campo de incisión 28 x 25cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-3989-1	2040	3M™ Steri-Drape™ Campo de incisión 28 x 41cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-3990-9	2045	3M™ Steri-Drape™ Campo de incisión 50 x 45cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co

Contáctenos

email: 3mcontacto@mmm.com

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá

01-8000-113636 Resto del País