

	<u>FICHA</u> <u>TECNICA</u>	
---	---	--

CITRILUB SPRAY LUBRICANTE MULTIUSOS.

Es un lubricante e inhibidor de corrosión de origen natural, especialmente diseñado para el cuidado y mantenimiento del instrumental médico quirúrgico y la limpieza y mantenimiento de las lavadoras mecánicas, automáticas, autoclaves y motores quirúrgicos; y toda clase de equipos que tengan materiales blandos y acero inoxidable. CITRILUB SPRAY es un producto 100% natural, ya que esta fabricado con terpenos de naranja valenciana la cual provee un rico aceite totalmente biodegradable y no dañino al medio ambiente

APLICACIONES	CITRILUB SPRAY Es un limpiador multipropósito confiable, 100% natural y se puede utilizar en toda clase de equipamiento hospitalario, veterinario, odontológico, y médico quirúrgico, tales como instrumental quirúrgico, piezas de mano, micromotores odontológicos, máquinas de lavado mecánicas y automáticas, autoclaves entre otros. También puede utilizarse en materiales plásticos o metálicos. Este producto no daña las superficies ni deja residuos grasos, ideal para brillar superficies metálicas y protegerlas de la corrosión y el óxido.	
USOS	CITRILUB SPRAY puede usarse en la etapa siguiente al proceso de limpieza de los dispositivos o superficies que se deseen lubricar. Aplicar en los dispositivos médicos, superficies, y/o motores la cantidad necesaria de producto que permita cubrir totalmente el área a tratar. Posteriormente se secan bien con una toalla de papel y se retiran los excesos del	
	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	

	lubricante. CITRILUB SPRAY es compatible con todos los métodos de esterilización y no requiere enjuague.
PRECAUCIONES	No debe ser ingerido, mantener fuera del alcance de los niños, producto de uso industrial e institucional. Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas
PRESENTACIÓN	CITRILUB: Pistola con gatillo aspersor de 120 ml, 350 ml, 450 ml.
FABRICADO	LABORATORIO ORGANIZA BIOTECH SAS
CERTIFICAD INVIMA	2017018365
DISPOSICIÓN FINAL	Ninguno. 100% Biodegradable.
COMPATIBILIDAD	CITRILUB es compatible con todo el instrumental quirúrgico metálico y plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	CITRILUB SPRAY debe de ser almacenado en un lugar fresco y limpio, alejado de la luz solar.

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	---	--