

	<u>FICHA</u> <u>TECNICA</u>	CITRILUB CITRILUB EMULSIÓN
---	---	--

CITRILUB EMULSIÓN Producto diseñado para ser utilizado en unidades medico hospitalarias como centrales de esterilización, puede ser utilizado manualmente o en thermolavadoras mecánicas de desinfección, especialmente dirigido al mantenimiento y preservación de instrumental quirúrgico, puede usarse en acero, titanio, crhome vanadium, aluminio y plástico. Producto natural no siliconado para no interferir en procesos, térmicos de esterilización.	
APLICACIONES	CITRILUB EMULSIÓN es un producto utilizado para la lubricación del instrumental quirúrgico, util en el proceso del mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos médicos.
USO	CITRILUB EMULSIÓN: LUBRICACIÓN MANUAL : utilice una onza/ 32 mililitros por litro de agua, tiempo mínimo de inmersión 5 a 10 minutos. LURICACIÓN MECANICA EN: Thermolavadoras y ultrasonido: utilice 4 a 6 mililitros por proceso, según programación de la máquina. Después de su preparación el producto dura como tiempo máximo 8 días.
PRECAUCIONES	No debe ser ingerido, mantener fuera del alcance de los niños, producto de uso industrial e institucional. Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas
PRESENTACIÓN	CITRILUB EMULSIÓN: Galón 4.000 ml, 10.000 ml
FABRICADO	LABORATORIO ORGANICA BIOTECH SAS
CERTIFICAD INVIMA	2017018365
DISPOSICIÓN FINAL	Ninguno. 100% Biodegradable.
COMPATIBILIDAD	CITRILUB EMULSIÓN es compatible con todos los dispositivos médicos, ya que es un producto totalmente biodegradable.

COMPONENTES	CITRILUB EMULSIÓN: Es un producto a base de aceites naturales derivados de palma, d, limoneno solvente natural y antioxidantes.
---------------------------	---

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	--	--

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESCARTE	CITRILUB EMULSION debe de ser almacenado en un lugar fresco y limpio, alejado de la luz solar, con una temperatura promedio entre (10 y 33 grados centígrados). Mantener fuera del alcance de los niños. Descartar directamente en los drenajes.

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	--	--