

	<u>FICHA</u> <u>TECNICA</u>	INSTRU GLO INSTRU GLO CREMA
---	---	---

INSTRU GLO CREMA es un limpiador desmanchador de instrumental quirúrgico y autoclaves, Contiene abrasivos muy suaves que garantizan una profunda y completa limpieza de las superficies donde se aplica, contiene solventes naturales a base de d' limoneno, eliminan oxido, manchas y grasa de forma efectiva.

Especialmente recomendado para la limpieza y desmanchado de todo tipo de instrumental quirúrgico de tipo metálico, Disuelve residuos minerales y grasos causados por aguas duras, elimina manchas amarillas en el instrumental debido a la exposición continua al calor en máquinas esterilizadoras, elimina oxido en material viejo y desgastado, evita el uso de limpiadores ácidos que son demasiado contaminantes y producen vapores y residuos muy peligrosos y nocivos para la salud.

APLICACIONES	Limpieza y desmanchado de instrumental quirurgico, puede utilizarse en instrumentos de Acero Inoxidable, tungsteno, titanio, carburo de tungsteno y Aluminio. no se debe utilizar sobre superficies plásticas o pintadas.
	INSTRUGLO CREMA sirve para la limpieza de cámaras interiores de autoclave, bandejas metálicas de máquinas de ultrasonido, superficies de aluminio, cobre, bronce, plata, mesones y superficies en acero inoxidable
USO	Aplíquese una pequeña cantidad de producto, frote suavemente con un paño, esponjilla de nylon, o cepillos grado médico. Deje actuar por un periodo de 2 a 3 minutos y posteriormente enjuague.

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	--	--

PRECAUCIONES	No se debe utilizar en instrumentos de acero al carbón cromado ya que este se caracteriza por ser un enchape cromado que se despegue muy fácilmente, tampoco en superficies pintadas o plásticas. Se puede utilizar sin necesidad de guantes ya que no ataca el PH de la piel. No debe ser ingerido, en contacto con mucosas debe ser enjuagado con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto de uso institucional e industrial únicamente. Utilice elementos de protección personal, como gafas, delantal, guantes.
PRESENTACIÓN	INSTRU GLO CREMA : Frasco 300 gms.
FABRICADO	LABORATORIO ORGANICA BIOTECH SAS
CERTIFICAD INVIMA	2017018366
DISPOSICIÓN FINAL	Ninguno. 100% Biodegradable.

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	---	--