



FICHA
TECNICA

INSTRU GLO L

INSTRU GLO L LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL

INSTRU GLO- L es una mezcla de detergente no iónico con ácidos naturales diseñados para renovar todo tipo de material e instrumental médico quirúrgico.

Disuelve residuos minerales, óxido y manchas generadas por aguas calcáreas y la continua exposición al calor de autoclaves.

INSTRU GLO - L contiene inhibidores de corrosión que ayudan a prolongar la vida útil de los instrumentos, es rápido y fácil de utilizar y ayuda a mantener el movimiento de clamps y pinzas con articulaciones. Con el uso continuo de este producto se obtienen grandes resultados en materia de ahorro al prolongar la vida útil de los valiosos instrumentos

APLICACIONES

INSTRUGLO L DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y AUTOCLAVES puede utilizarse para desincrustar instrumentos de Acero Inoxidable y Titanio. Previene la corrosión elimina manchas y óxido, revitaliza el acabado original del instrumento.

No se recomienda utilizar INSTRUGLO L en material de aluminio y cromo vanadium.

USO

Diluir una parte de INSTRU GLO – L en 7 partes de agua, o 150 mililitros por litro de agua a temperatura ambiente, sumerja por espacio de 10 a 15 minutos máximo, después de preparado su tiempo de durabilidad es de 30 días. Para maquina thermolavadora utilice en ciclo 40 mililitros por litro.

DINMED
Calle 66ª Nro. 43-07
Teléfono (57+4) 6048517

PRECAUCIONES 	INSTRU GLO -L manténgase alejado de los niños, producto de uso industrial hospitalario, para su manipulación utilice gafas de protección, guantes y delantal plástico, manténgase almacenado en un sitio fresco. Producto ácido remítase a LA FDS para más información. No se recomienda la utilización del producto de forma pura.
PRESENTACIÓN	INSTRU GLO L: Galón 4000 ml.
FABRICADO	LABORATORIO ORGANICA BIOTECH SAS
CERTIFICADO INVIMA	2017018793
DISPOSICIÓN FINAL	Ninguno. 100% Biodegradable.
PROPIEDADES	Forma Líquido Olor N/a Color transparente Efectividad en agua Excelente Detergentes No iónico Espuma baja Fosfatos Ninguno Biodegradabilidad Completa Estable en Almacenaje 24 meses Estabilidad en Frío 0 ° C Factor Corrosivo Si, no se debe utilizar puro. Inflamabilidad Ninguna Punto de Ebullición 100 ° C Presión de Vapor Ninguna Soluble en Agua 100 % Gravedad Específica 1.1 Parámetro de pH 1

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESCARTE	INSTRUGLO L debe de ser almacenado en un lugar fresco y limpio, alejado de la luz solar, con una temperatura promedio entre (10 °C a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños. Descartar directamente en los drenajes.
--	---

	DINMED Calle 66ª Nro. 43-07 Teléfono (57+4) 6048517	
--	--	--